

Nucleus<sup>®</sup>  
freedom™

## Uppgradera till Freedom!

Till dig som har ett Nucleus<sup>®</sup> 22-  
implantat.

Hear now. And always



## Nu har ni som har ett Nucleus<sup>®</sup> 22-implantat möjlighet att uppgradera er processor till den senaste tekniken Cochlear<sup>™</sup> kan erbjuda – Freedom<sup>™</sup>

### Bra att veta:

- Du måste byta ut din ESPrit 3G<sup>®</sup>, ESPrit 22<sup>®</sup> eller Spectra<sup>®</sup> till en Freedom<sup>™</sup>.
- Du får tillgång till den nya tekniken SmartSound<sup>™</sup> 2.
- Freedom är en processor som bättre motstår fukt och väta.
- Fler batterival, bl.a. uppladdningsbara batterier.
- Fler möjligheter att fästa batterierna.
- Ljudet bearbetas digitalt.
- Freedomprocessorn är förberedd för framtida förbättringar.



## SmartSound™ 2: Med fyra förinställningar



### Vardag

Vardags-programmet är till för att ge dig förbättrad hörsel i miljöer med minimalt bakgrundsbrus. Kommer sannolikt att vara din huvudsakliga inställning i ljudprocessorn.



### Buller

Buller-programmet är till för att ge dig förbättrad hörsel i en miljö med mycket bakgrundsbrus i alla riktningar. Exempelvis i affärscentra, kyrkor, sportevenemang med mera.



### Fokus

Fokus-programmet är till för att ge dig förbättrad hörsel där det är mycket bakgrundsbrus. Mest användbar när man vill lyssna på personer rakt framför en själv.



### Musik

Musik-programmet är till för att förhöja din musikupplevelse. Användbar för levande musik eller varför inte koppla en mediaspelare som en iPod® eller liknande.

# Freedom™

Nu även för dig med Nucleus 22 implantat.

## Intressanta fakta:

Den kliniska utvärderingen av Freedom för N22 visar signifikant förbättring av talförståelse i tyst miljö både då talet presenteras på normalstark nivå (60 dB SPL), men även för tystare tal (50 dB SPL) jämfört med de tidigare processorerna.

SmartSound 2 gav ett uppskattat stöd i många olika miljöer. Speciellt uppskattat blev programmet *Buller* som gjorde att flera personer vågade sig ut i situationer de tidigare inte klarat av.

Kontakta din CI-klinik  
för mer information.



## Cochlear Nordic AB

Konstruktionsvägen 14  
435 33 Mölnlycke  
Sverige

Tel: 031-335 14 61

Fax: 031-335 14 60

E-mail: [nordic@cochlear.se](mailto:nordic@cochlear.se)

[www.cochlear.se](http://www.cochlear.se)

Hear now. And always



Cochlear™