

l'activation & la malette ¹²

Quelques semaines après l'intervention chirurgicale, vous allez recevoir votre processeur pour son activation. Vous trouverez dans cette fiche les principales étapes de ce moment très important pour vous. Cette fiche vous permet de vous préparer à votre première séance et peut vous être très utile dans les jours suivants. Votre régleur vous présentera la malette d'activation comme décrite ci-dessous.

1. Présentation de la malette Cochlear

Le jour de l'activation, une malette contenant votre processeur vous sera remise avec de nombreux accessoires.



2. Le plateau d'activation

Il comprend tous les équipements indispensables que votre régleur vous adaptera.



Son contenu

1. Unité de traitement
2. Câble d'antenne
3. Antenne
4. Aimant
5. Compartiment à piles
6. Cache piles
7. Assistant sans fil (*)

3. Assemblage des différentes parties du processeur



Son contenu

1. Unité de traitement
2. Câble d'antenne
3. Antenne + aimant
4. Corne d'oreille
5. Compartiment à piles
6. Cache piles

4. Connexion de votre processeur à l'ordinateur du régleur



Câble de liaison du régleur

5. Mise en place du processeur sur votre oreille



6. Début du premier réglage



(*) L'Assistant sans fil et son étui de protection



Contrôle votre processeur sans avoir à manipuler les boutons de ce dernier. Aide au diagnostic de votre processeur.

l'activation & la malette ^{2|2}

Vous trouverez également toute une série d'accessoires qui peut être complétée. Certains peuvent s'adapter à votre anatomie (puissance de l'aimant, longueur du câble d'antenne, taille de la corne d'oreille...). N'hésitez pas à consulter le catalogue accessoires que vous trouverez dans le Pack Documentation.^(*)

Deux batteries rechargeables standards



Chargeur de batteries, adaptateur et jeu de prises internationales

Pour recharger de 1 à 4 batteries et l'Assistant sans fil.



Piles

Votre processeur fonctionne également à l'aide de deux piles recyclables.

Astuce : très pratique pour éviter d'emporter le chargeur en week-end !



Câble d'antenne supplémentaire

D'une longueur différente du premier pour vous permettre d'ajuster confortablement votre processeur.



Trois cornes d'oreille



Protections des microphones

Il est recommandé de les remplacer régulièrement pour une captation maximale des sons.

Astuce : Utilisez les changements de saison comme repère!



Adaptateur prise accessoires

Si vous portiez un Freedom précédemment, connexion de vos câbles Freedom sur votre processeur CP810.



Ecouteurs

Branchés sur la prise accessoires de votre processeur, ils permettent à une personne **entendante** de vérifier le fonctionnement de vos microphones.

Important : Ils ne lui permettront pas d'entendre de ce que vous entendez.



Déshumidificateur électrique

Y placer votre processeur chaque soir afin de le sécher correctement.

Fonctionne avec une capsule Dry-Brick
Important : Changez la capsule tous les deux mois environ. N'oubliez pas d'ôter le film aluminium.



Etui de transport



Important

le Pack Documentation

^(*) Vous trouverez dans l'emballage cartonné jaune, de nombreuses informations. Il est très important que vous en preniez connaissance afin d'obtenir le maximum de satisfaction de votre système.

- Formulaire d'enregistrement du processeur : il doit impérativement être retourné pour activer la garantie. Demandez conseil à votre centre.
- Carte d'identification : à conserver sur vous en cas de besoin
- Conditions générales de garantie
- Catalogue accessoires et pièces de rechange
- Informations importantes relatives à l'utilisation de votre processeur
- Guide de dépannage
- Guide utilisateur du processeur de son
- Guide utilisateur de poche : pour une prise en main rapide et pour avoir l'essentiel des informations toujours sous la main.

► De nombreuses informations sont également disponibles sur la rubrique Utilisateurs www.cochlear.fr