

soins du processeur

les 10 commandements pour bien entretenir votre processeur

1 Manipulez votre processeur avec soin.

Pour les Freedom™ et CP810 ne forcez pas sur le connecteur baïonnette. Saisissez toujours les câbles par les extrémités



2 Tous les soirs, placez le processeur dans le déshumidificateur en retirant les piles.

Important : Les briques ou pastilles doivent être remplacées tous les deux mois. Pour qu'elles soient activées il est nécessaire de retirer la pellicule aluminium (presser fortement avec le pouce le centre de la brique sur certains modèles). Votre processeur doit être éteint si vous ne l'utilisez pas.




3 Si vous possédez un CP 810, n'utilisez pas de couteau ou d'autres outils non fournis par Cochlear pour verrouiller ou déverrouiller le cache piles.

Si vous possédez un Freedom™, utilisez le porte-clés piles pour retirer le compartiment à piles



4 Entretenez vos microphones

Freedom™/CP 810 : changez régulièrement (environ tous les 3 mois) les protections microphones et lorsque vous ressentez une baisse de la qualité du son – Pour les enfants il est conseillé de les changer une fois par mois. Pour tous les autres processeurs, utilisez la soufflette.

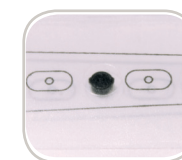

5 Nettoyez régulièrement l'extérieur du processeur avec un linge humide pour empêcher l'accumulation d'impuretés.



6 Ne laissez pas votre processeur ou l'assistant sans fil CR110, dans un sac, un vestiaire ou voiture, car ils pourraient être confondus avec une oreillette type bluetooth ou un lecteur MP3.



7 Ne mettez pas votre processeur au contact du sable ou de l'eau.

8 Retirez le processeur dans les manèges ou attractions des parcs de loisirs, et maintenez le processeur avec un bandeau pour certaines activités (ski par exemple) en raison du risque de chute.

9 Il est fortement conseillé d'assurer son processeur contre le vol, la perte ou les dommages accidentels, non couverts par la garantie fabricant ni par le contrat de maintenance.



10 Si vous avez accès à internet, connectez-vous régulièrement sur le site www.cochlear.fr vous pourrez connaître les dernières mises à jours dans les rubriques, Assistance en ligne, Communauté, Événements...