

快速检查

ESPril™ 3G 言语处理器



每天在您打开处理器之前请检查以下事项：

- 导线是否有断裂或破损现象，与处理器连接是否正确
- 模式设置（位于处理器底部）是否设置在您所需要的模式（1）
- 程序定位、灵敏度或音量控制是否设置在您的临床医师所推荐的档次（2）
- 传输线圈是否位于您头部的适当位置。

每天晚上关闭处理器后请检查以下事项：

- 请使用麦克风吹扫器（3）清洁麦克风所在部位
- 夜晚请将语言处理器和干燥助剂放在一起存储。
处理器受潮可能会导致中断或故障。

如果您听不到任何来自处理器的声音，请遵循以下步骤操作：

- 1 言语处理器复位：将处理器关闭约 5 秒钟，然后重新开机。
- 2 用信号检测仪检查传输线圈。（4）若信号检测仪指示灯发亮，表明线圈可正常工作。
若指示灯不亮，请更换传输线圈和导线。
- 3 将所有电池更换为全新强力锌空气电池。
拆除电池封条，等至少一分钟后再装入处理器。
每隔一段时间，用清洁刷清洁电池接点。
- 4 请一个听力正常的人使用监听耳机检查 ESPril™ 3G 的麦克风(5)。
连接并使用领佩式麦克风（6）。如音质有所改善表明 ESPril 3G 麦克风可能出现故障
或需要干燥助剂进行干燥。若干燥后仍不能解决此问题，请与服务中心联系。
- 5 处理器应当远离可能产生干扰的电子设备。
- 6 确保模式转换开关“TWM”设定在正确位置。（1）
注：确保您使用了正确的导线/线圈。
Nucleus® 24 型导线接头是黄色的。Nucleus® 22 型导线接头是绿色的。

