

快速检查

SPrint™ 言语处理器



每天在您打开处理器之前请检查以下事项：

- 头件和传输导线连接是否正确
- 导线是否有断裂或破损
- 传输线圈是否位于您头部的正确位置

每天在您打开处理器之后请检查以下事项：

- 麦克风—将灵敏度设置在推荐的水平，对着麦克风讲话，确保液晶显示器上的节段针对声音有反应。
- 灵敏度水平—如果声音过高或过低请调节灵敏度水平，或打开灵敏度自动调节。
注：如果推荐的灵敏度设置声音过高或过低，请与客户服务中心联系。

每天晚上在您关闭处理器后请检查以下事项：

- 请将头件和干燥剂放在一起存放。受潮可能会导致其中断或故障。

如果您听不到任何来自处理器的声音，请遵循以下步骤操作：

- 1 若液晶显示屏没有显示，或显示“电力不足”的符号，请更换新电池。（1）
确保正确装入电池。
每隔一段时间，用清洁刷清洁电池触点
若可充电电池过期或电池充电器无法给电池充电，请更换这些可充电电池。
- 2 保持 SPrint™ 处理器开着，将传输线圈放于处理器后盖上，这时传输线圈和处理器仍然是用导线连在一起的（2），则液晶显示器应显示发射塔信号（3）。
也可使用信号检测仪检查传输线圈。若信号检测仪指示灯点亮，表明线圈可正常工作。若指示灯不亮，请更换传输线圈、传输导线或头件导线。
- 3 若液晶显示器上同时显示了“手册”和“维修”扳手状符号（4）：
处理器复位，即关闭处理器然后再打开
使用程序选择按钮选择另一个程序
在某些情况下，程序选择可能是自动的。请与客户服务中心联系。
- 4 请一个听力正常的人使用监听耳机检查麦克风（5）
连接并使用领佩式麦克风（6）。如音质有所改善表明 SPrint 麦克风可能出现故障或需要用干燥剂进行干燥。若干燥后仍不能解决此问题，请与客户服务中心联系。
- 5 处理器应当远离可能产生干扰的电子设备。

完成每一步后，检查处理器是否有声音。如果仍然没有声音，请与您的客户服务中心联系。

