

## エスプリ/エスプリ22：一聞こえに異常があったら— こんな時どうしますか？

電池を全て新しいものに交換し、



コイルチェッカの赤ランプが点灯？



電池電圧の低下です。  
新しい電池2個のシールをはがし5分間空気にさらした後、再度交換してみてください。  
交換後OK？

送信ケーブルを交換後OK？



送信コイルを交換後OK？



電池カバーをオーディオカバーに取り替え、



ラペルマイクが使用可能？



健聴者が内蔵マイクのチェックをできます

モニタイヤホンが使用可能？



正常に音が聞こえる場合

正常に音が聞こえない場合

正常に音が聞こえない場合

正常に音が聞こえる場合  
問題ありません。

プロセッサの内蔵マイクの故障です。

それでも異常があるときは、スピーチプロセッサ本体の故障の可能性があります。病院の先生に連絡してください。