

MSP/スペクトラ：一聞こえに異常があったら— こんな時どうしますか？

電池を新しいものに**交換し、**



スイッチTで**Mランプ**が点灯？




ゆっくり点滅

電池電圧の低下です。新しい電池に再度交換してみてください。

全く**点灯しない**

スピーチプロセッサの故障です。病院の先生に連絡してください。

スイッチN、感度設定5にしたとき、音に合わせて**Mランプ**が点滅？

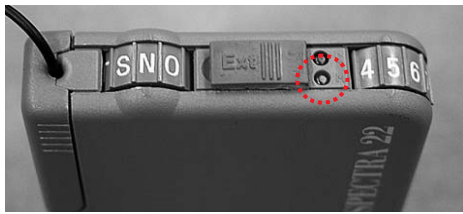

送信ケーブルを交換後OK？




送信コイルを交換後OK？




ラベルマイクで聞こえる？



マイクロホンを交換後OK？

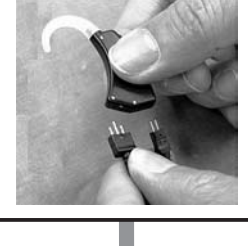


スピーチプロセッサにコイルを近づけると、**Cランプ**が点滅？

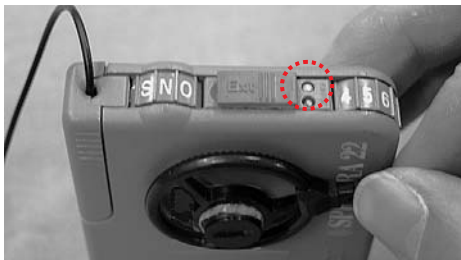

接続ケーブルを交換後OK？



マークを合わせる

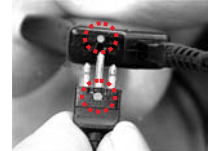

それでも異常があるときは、スピーチプロセッサ本体の故障の可能性があります。病院の先生に連絡してください。