


# スプリント： 一聞こえに異常があったら— こんな時どうしますか？


電池を全て新しいものに**交換し**、



スイッチを入れたときに**正常表示**？

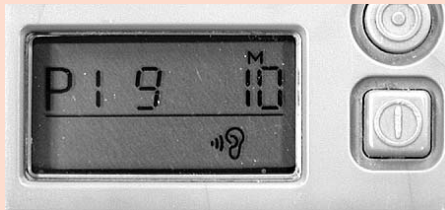


電池電圧の低下です。新しい電池に再度交換してみてください。

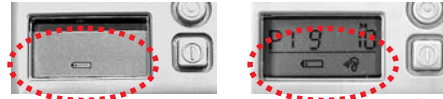


スピーチプロセッサの故障です。病院の先生に連絡してください。



感度設定10で音に合わせて**レベルメータ**が表示？

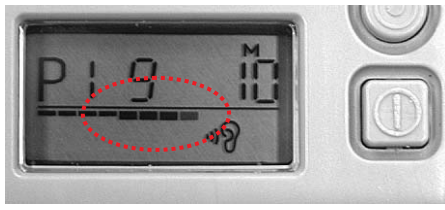

**送信ケーブル**を交換後OK？

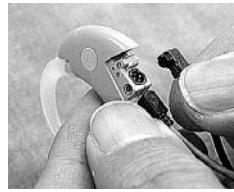

**送信コイル**を交換後OK？



スピーチプロセッサにコイルを近づけると、**無線信号テストコイル**が表示？



**ラペルマイク**で聞こえる？



**マイクロホン**を交換後OK？



**接続ケーブル**を交換後OK？



それでも異常があるときは、スピーチプロセッサ本体の故障の可能性があります。病院の先生に連絡してください。