



German

Cochlear™
Nucleus® CR110 Fernbedienung
Kurzanleitung

Hear now. And always
Cochlear®

Die Fernbedienung



Drucktasten

Telefonspule aktivieren bzw. deaktivieren

Lautstärke einstellen
Mit der Lautstärke-
regelung stellen
Sie die Lautstärke-
wahrnehmung ein.

Beachten Sie die
Status-LED.

Tastatur sperren
bzw. entsperren

Bildschirm
„Home“

Drucktasten


Mikrofonempfindlichkeit
einstellen
Über die Mikrofon-
empfindlichkeit definieren
Sie den niedrigsten Pegel
von Audiosignalen, der
von den Mikrofonen
aufgenommen wird.

- Ein-/Ausschalten (längeres Drücken)
- Überprüfen des Soundprozessor-Status
- Zum Menü „Home“ zurückkehren

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Sprache der Fernbedienung auswählen

Wenn die Fernbedienung nicht mit dem Soundprozessor verbunden ist, wird nach dem Einschalten der Fernbedienung der Bildschirm zum Auswählen der Sprache angezeigt.

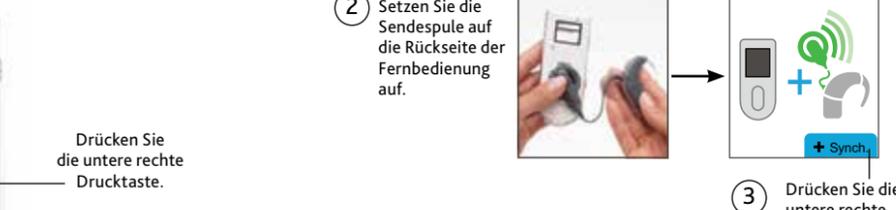


- Drücken Sie die untere linke Drucktaste.
- Drücken Sie die untere rechte Drucktaste.

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Fernbedienung mit dem Soundprozessor synchronisieren (verbinden)

- Stellen Sie sicher, dass der Soundprozessor und die Fernbedienung eingeschaltet sind.
- Setzen Sie die Sendespule auf die Rückseite der Fernbedienung auf.
- Drücken Sie die untere rechte Drucktaste.
- Es wird eine Synchronisationsbestätigung angezeigt.


Träger von zwei Implantaten:
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auch für den anderen Soundprozessor.

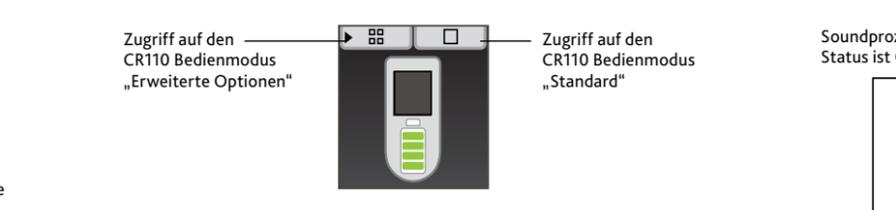

Empfohlene Vorgehensweise . . .

CR110 Bedienmodus „Standard“ oder „Erweiterte Optionen“ auswählen

Beim ersten Einschalten der Fernbedienung wird automatisch der CR110 Bedienmodus „Standard“ aktiviert. Um in den CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“ zu wechseln, drücken Sie die obere linke Drucktaste, wenn der Bildschirm zur Anzeige des Akkuladestatus der Fernbedienung angezeigt wird.

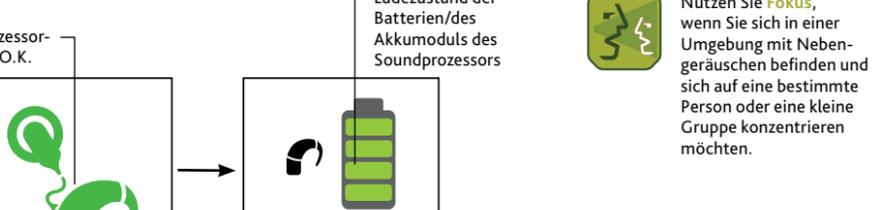

Zugriff auf den CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“

Zugriff auf den CR110 Bedienmodus „Standard“


So schalten Sie zwischen den CR110 Bedienmodi „Erweiterte Optionen“ und „Standard“ um:

- Schalten Sie die Fernbedienung aus und wieder ein.
- Drücken Sie bei angezeigtem Bildschirm zur Anzeige des Akkuladestatus die obere linke Drucktaste, wenn Sie den CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“ auswählen möchten. Um den CR110 Bedienmodus „Standard“ auszuwählen, drücken Sie die obere rechte Drucktaste.

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Soundprozessor-Status prüfen

Drücken Sie im Bildschirm „Home“ die Cochlear™ Taste, um den Status des Soundprozessors bzw. die Status der beiden Soundprozessoren zu prüfen.

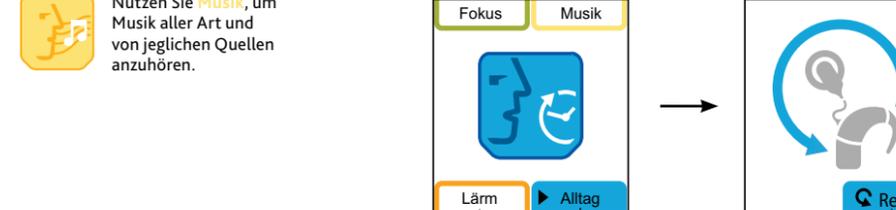

Soundprozessor-Status ist O.K.

Ladezustand der Batterien/des Akkumoduls des Soundprozessors

Pegel der eingehenden Audiosignale

Empfohlene Vorgehensweise . . .


Zwischen den Programmen wechseln

Drücken Sie für das von Ihnen gewünschte Programm die entsprechende Drucktaste.


- Nutzen Sie **Fokus**, wenn Sie sich in einer Umgebung mit Nebengeräuschen befinden und sich auf eine bestimmte Person oder eine kleine Gruppe konzentrieren möchten.
- Nutzen Sie **Musik**, um Musik aller Art und von jeglichen Quellen anzuhören.
- Nutzen Sie **Lärm** in Umgebungen mit andauernd lauten Hintergrundgeräuschen aus verschiedenen Richtungen.
- Nutzen Sie **Alltag**, wenn Sie sich in einer typischen alltäglichen Hörsituation ohne wesentliche Nebengeräusche befinden.

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Soundprozessor auf die von Ihrem Audiologen eingestellten Werte zurücksetzen

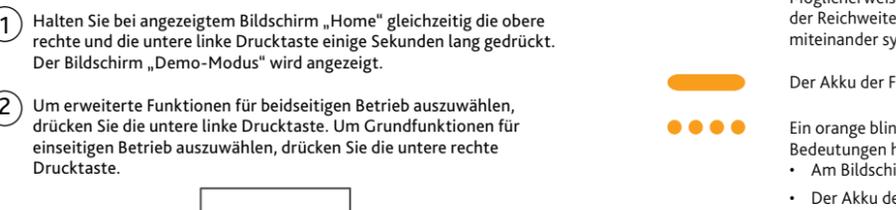

- Bei angezeigtem Bildschirm „Home“ drücken und halten Sie gleichzeitig die untere linke und die untere rechte Drucktaste.
- Um das Zurücksetzen zu bestätigen, drücken Sie die rechte untere Drucktaste.

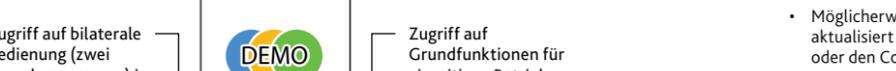

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Aktivieren der automatischen Telefonspule*

- Einige Sekunden lang gedrückt halten.
-
-

Ist die Funktion automatische Telefonspule programmiert, schaltet diese sich automatisch ein, sobald ein Sprachsignal von einem induktionsfähigen Telefon (beim Telefonieren) oder einer Rauminduktionsschleife übertragen wird.

Wechseln von „automatische Telefonspule“ zu „Telefonspule ein“ und „Telefonspule aus“

- Kurz drücken.
-
-

Automatische Telefonspule* verfügbar

Telefonspule* aktiviert

Telefonspule ausgeschaltet


* Diese Funktion kann nur von Ihrem Audiologen programmiert werden.

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Demo-Modus verwenden

Der Demo-Modus bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den Funktionen der Fernbedienung vertraut zu machen. So starten Sie den Demo-Modus, wenn die Fernbedienung mit Ihrem Soundprozessor bereits verbunden ist:

- Halten Sie bei angezeigtem Bildschirm „Home“ gleichzeitig die obere rechte und die untere linke Drucktaste einige Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm „Demo-Modus“ wird angezeigt.
- Um erweiterte Funktionen für beidseitigen Betrieb auszuwählen, drücken Sie die untere linke Drucktaste. Um Grundfunktionen für einseitigen Betrieb auszuwählen, drücken Sie die untere rechte Drucktaste.

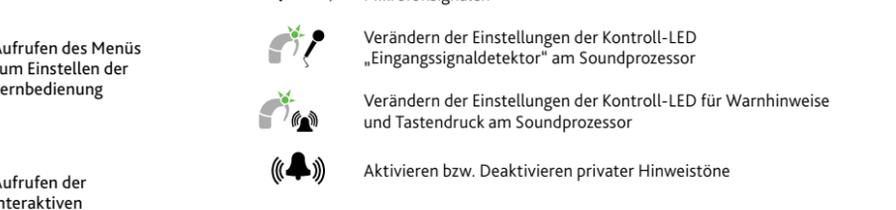

Zugriff auf bilaterale Bedienung (zwei Soundprozessoren) im CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“

Zugriff auf Grundfunktionen für einseitigen Betrieb (ein Soundprozessor)

So deaktivieren Sie den Demo-Modus: Schalten Sie die Fernbedienung aus und wieder ein.


Bedeutung der Status-LED

| Leuchtsignal | Bedeutung |
|--------------|---|
| | Der Soundprozessor befindet sich in Reichweite der Fernbedienung, und beide Systeme kommunizieren miteinander. |
| | Der Soundprozessor kommuniziert nicht mit der Fernbedienung. Möglicherweise befinden sich beide Komponenten außerhalb der Reichweite der jeweils anderen, oder sie sind nicht miteinander synchronisiert. |
| | Der Akku der Fernbedienung wird geladen. |
| | Ein orange blinkendes Leuchtsignal könnte folgende Bedeutungen haben: <ul style="list-style-type: none"> Am Bildschirm wird ein Warnhinweis angezeigt. Der Akku der Fernbedienung ist fast entladen oder entladen. Möglicherweise muss die Software der Fernbedienung aktualisiert werden. Wenden Sie sich an Ihren Audiologen oder den Cochlear™ Service. |
| | Die Fernbedienung ist vollständig geladen, und das USB-Kabel ist noch angeschlossen. |

Empfohlene Vorgehensweise . . .

Auf zusätzliche Funktionen zugreifen (betrifft nur CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“)

Drücken Sie im Bildschirm „Home“ die Cochlear™ Taste, um den Bildschirm zur Anzeige des Soundprozessor-Status anzuzeigen.

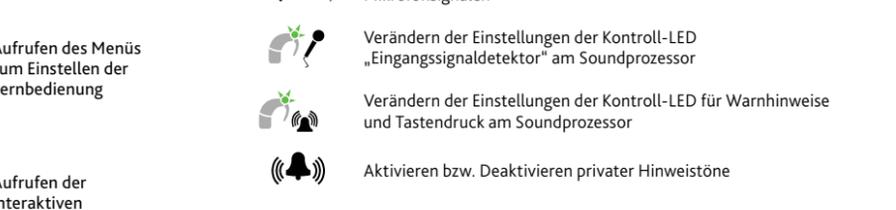

Aufrufen des Menüs für die Soundprozessor-Einstellungen

Bildschirm zur Anzeige des Soundprozessor-Status

Aufrufen des Menüs zum Einstellen der Fernbedienung

Aufrufen der interaktiven Fehlerbehebung

Soundprozessor-Einstellungen ändern (betrifft nur den CR110 Bedienmodus „Erweiterte Optionen“)

| Symbol | Bedeutung |
|--------|---|
| | Verändern des Mischungsverhältnisses von Telefonspulen- und Mikrofonsignalen |
| | Verändern des Mischungsverhältnisses von Audiozubehör- und Mikrofonsignalen |
| | Verändern der Einstellungen der Kontroll-LED „Eingangssignaldetektor“ am Soundprozessor |
| | Verändern der Einstellungen der Kontroll-LED für Warnhinweise und Tastendruck am Soundprozessor |
| | Aktivieren bzw. Deaktivieren privater Hinweistöne |

Nähere Informationen zur Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch zur CR110 Fernbedienung.