

# Cochlear™ Nucleus® Aqua+



## Veelgestelde vragen

### V Wat is de Aqua+?

A De Aqua+ is een zacht, flexibel siliconen omhulsel dat rond een bestaande Nucleus® CP810 of CP900 serie geluidsprocessor past. Wanneer dit hoesje samen met de Aqua+ zendspool gebruikt wordt, kunnen CI-gebruikers genieten van wateractiviteiten waarbij extra bescherming nodig is.

### V Is de Aqua+ waterdicht?

A Ja. De Aqua+ heeft een IP68 beschermingscore tegen invloeden van buitenaf behaald in 3 meter stilstaand water gedurende 2 uur. Cochlear heeft ook uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd om baden in zeewater en zwemmen in chloorwater of zout water te simuleren.

### V Met welke processor(s) is het compatibel?

A De Aqua+ werd uitsluitend ontworpen voor de geluidsprocessors Nucleus CP910 of CP920 en de geluidsprocessor Nucleus CP810 met oplaadbare batterijen.

### V Kan ik mijn normale zendspool en zendspoelsnoer gebruiken met de Aqua+?

A Nee, de Aqua+ mag enkel worden gebruikt met de specifieke Aqua+ zendspool. Het geïntegreerde zendspoelsnoer is speciaal ontworpen voor onderwaterzwemmen in alle typen water, terwijl uw standaard zendspool en zendspoelsnoer dat niet zijn.

### V Waarom kan ik geen zink-lucht batterijen gebruiken?

A Zink-lucht batterijen hebben lucht nodig om actief te blijven en zullen niet werken in de Aqua+ omdat de Aqua+ luchtdicht is.

### V Wat heb ik nodig om de Aqua+ te gebruiken?

A De Aqua+ moet worden gebruikt met de Aqua+ zendspool. De Aqua+ gebruikerskit wordt geleverd met de Aqua+, Aqua+ zendspool, magneet, Mic Lock-beugel, het veiligheidskoordje en bewaaretui. Nieuwe gebruikers moeten van start gaan met de Aqua+ gebruikerskit.

### V Hoe koop ik dit allemaal?

A Als u de Aqua+ voor het eerst gebruikt, dient u enkel de Aqua+ gebruikerskit te bestellen. Deze bevat alles wat u nodig heeft om er meteen in te duiken! Als u individuele onderdelen moet vervangen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Cochlear klantendienst.

### V Hoe wordt de Aqua+ gebruikt?

A De gebruiker verzegelt de geluidsprocessor in het hoesje en bevestigt de speciaal ontworpen Aqua+ zendspool aan de processor. Deze kan vervolgens achter het oor worden gedragen zoals normaal. De Aqua+ is ontworpen voor gebruik zonder een bevestigingsmiddel. Bij intensievere activiteiten wordt het gebruik van een bevestigingsmiddel zoals de Mic Lock-beugel die in de kit wordt meegeleverd, aanbevolen.

### V Waar kan ik de Aqua+ gebruiken?

A De Aqua+ is ontworpen voor gebruik bij elke wateractiviteit tot een diepte van 3 meter. Daarom wordt persluchtduiken afgeraden omdat men hier dieper dan 3 meter kan gaan.

**V Kan de Aqua+ in alle typen water worden gebruikt?**

**A** Ja, de Aqua+ kan worden gebruikt in zeepwater in het bad of onder de douche, in zwembaden met chloorwater, zwembaden met gedeeltelijk zoutwater/chloorwater, in zoutwater en zoetwater.

**V Kan de Aqua+ in de sauna worden gebruikt?**

**A** De Aqua+ heeft een test bij 70 graden Celsius en een vochtigheid van 95% doorstaan. Voor werkingstemperaturen dienen gebruikers de handleiding van de geluidsprocessor te raadplegen.

**V Wanneer moet ik de Aqua+ (hoes) vervangen?**

**A** Uit onderzoek blijkt dat de Aqua+ (het siliconen omhulsel) ongeveer 50 keer kan worden gebruikt. Dit is een gemiddelde onder testomstandigheden – sommige gebruikers kunnen deze veel vaker gebruiken afhankelijk van hoe zij deze gebruiken en hoe goed ze er voor zorgen. U moet het Aqua+ hoesje controleren op tekens van slijtage of schade voor en na elk gebruik. Als water wordt opgemerkt in het hoesje, wijst dit op schade en dient het te worden vervangen.

**V Moet ik mijn MAP-instellingen wijzigen om de Aqua+ te gebruiken?**

**A** Proefpersonen gaven aan dat zij voldoende hoorden zonder de MAP- of programma-instellingen te wijzigen. Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een standaard richtingsgevoeligheidsprogramma zonder SCAN, SNR-NR en Wind Noise Reduction voor gebruik met de Aqua+. Dit type MAP is equivalent aan het standaardprogramma „Dagelijks” van de CP810. Indien u dat wenst, kan uw specialist een specifiek programma voor u maken.

**V Kan ik de Aqua+ en Aqua+ zendspoel gebruiken als mijn standaardconfiguratie?**

**A** De Aqua+ en Aqua+ zendspoel zijn ontwikkeld en getest voor periodiek gebruik in water. Cochlear raadt het gebruik van de Aqua+ en Aqua+ zendspoel af voor permanent gebruik als een standaardconfiguratie.

**V Heeft de Aqua+ zendspoel een sterkere magneet nodig?**

**A** Nee. Testen met proefpersonen geven aan dat de gangbare magneetsterkte van de gebruiker voldoende is voor gebruik met de Aqua+.

**V Is de Aqua+ recycleerbaar?**

**A** Omdat er verschillende onderdelen van verschillende materialen in de Aqua+ geïntegreerd zijn, is het niet mogelijk om te recycleren.

**V Wat gebeurt er als de Aqua+ een storing vertoont?**

**A** In het onwaarschijnlijke geval dat een verzegelde Aqua+ een storing vertoont, hebben de processors die bedoeld zijn voor gebruik met de Aqua+ een bescherming tegen invloeden van buitenaf met beschermingsklasse IP57, wat voldoende bescherming biedt in geval van een lek. De garantie van de geluidsprocessor blijft geldig wanneer een processor beschadigd geraakt, indien hij conform de instructies van de Aqua+ wordt gebruikt.

**V Zijn de processor en Aqua+ gedekt door een garantie als deze verloren geraken tijdens het zwemmen?**

**A** Nee. De gebruikerskit bevat het veiligheidskoordje voor gebruik in omgevingen waar het apparaat eventueel kan loskomen van het oor en verloren kan gaan, zoals in de zee, waterparken, rivieren en meren.

**Cochlear AG**, EMEA Headquarters  
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland  
Tel: +41 61 205 0404 Fax: +41 61 205 0405  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus en het elliptische logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited.  
© Cochlear Limited 2014 N37014F ISS1 AUG14 Dutch Translation of N36949F ISS1