

Guide de jumelage (pour Android™ PI285539 version 3.0)

Ce guide vous explique comment jumeler vos processeurs Cochlear™ Kanso® 2 avec l'application Nucleus Smart sur un smartphone Android* compatible, afin de pouvoir utiliser l'application pour contrôler et surveiller vos processeurs.

* Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez le site www.cochlear.com/compatibility.

REMARQUE Pour utiliser la version Android de l'application, votre processeur doit avoir la dernière version du micrologiciel installée. Consultez votre régleur.

Jumelage de votre ou vos processeur(s)

REMARQUES

- Si vous disposez d'autres processeurs déjà jumelés, vous devez tout d'abord les déconnecter. Consultez la page 2 pour les instructions de déconnexion.
- Interférences radio : lorsque vous tentez de jumeler ou de connecter votre processeur avec l'application, il est possible que certains appareils produisent des interférences (par ex., des fours à micro-ondes, des routeurs sans fil ou des émetteurs audio TV). Si cela se produit, éloignez-vous de l'appareil concerné et réessayez.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre smartphone Android.
- 2 Lancez l'application Nucleus Smart.
- 3 Faites glisser votre doigt sur les écrans de bienvenue.
- 4 Créez votre **compte** Cochlear (ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte).

- 5 Préparez vos processeurs et appuyez sur **Démarrer la configuration**.




- 6 **Éteignez puis allumez** vos processeurs. Si vous disposez de deux processeurs, effectuez cette opération pour chacun d'eux, l'un après l'autre. Votre appareil recherche votre/vos processeur(s)...

REMARQUE Si vous utilisez **un processeur et une prothèse auditive compatible**, vous pouvez également les jumeler de cette façon.

- 7 Appuyez sur **Continuer**.



- 8 Lorsque votre ou vos processeurs s'affichent, **appuyez** une fois sur pour démarrer le jumelage.

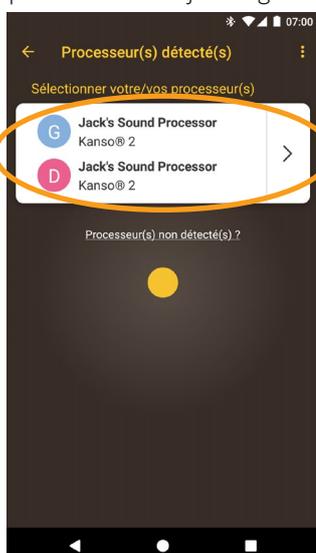

- 9 Cet écran s'affiche lorsque le jumelage est terminé. Appuyez sur **Vérifier le processeur**.




À SUIVRE...

10 Suivez les invites à l'écran pour **Vérifier** les processeurs.
L'écran de **préparation des processeurs** s'affiche pendant 30 secondes.

11 Appuyez sur une option de l'écran **processeur(s)**. Si vous y êtes invité, entrez les détails de l'utilisateur.

12 Lorsque la configuration est terminée, cet écran s'affiche. Appuyez sur **Démarrer**.

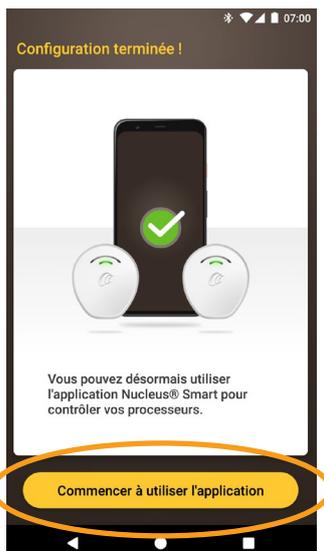

REMARQUE
Pour jumeler d'autres appareils compatibles, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth sur les appareils déjà jumelés.

Vous pouvez maintenant utiliser **l'application Nucleus Smart** ! Pour plus de détails, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

Smartphones avec diffusion audio pour prothèses auditives

Si votre smartphone prend en charge la diffusion audio pour les prothèses auditives, vous pouvez recevoir le son de votre téléphone directement sur votre processeur.
Pour configurer la diffusion audio :


1 Lorsque l'écran **Diffusion audio** s'affiche, appuyez sur **Activer**. Vos processeurs s'arrêtent pendant quelques instants.



2 Si d'autres processeurs sont déjà jumelés ou diffusés sur votre smartphone, vous devez sélectionner l'option **Oublier maintenant**.

Suivez les invites à l'écran pour **Oublier** les processeurs, puis appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir à l'application Nucleus Smart.

3 Attendez que l'écran **Connexion au processeur** s'affiche.

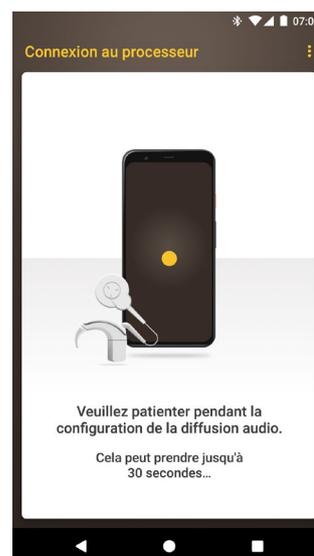


À SUIVRE...

4 Si les **sons du système** sont activés sur votre smartphone, l'écran **Sons du système** s'affiche.

Suivez les invites à l'écran pour **désactiver les sons du système**, puis appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir à l'application Nucleus Smart.



5 Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, appuyez sur **Continuer**.

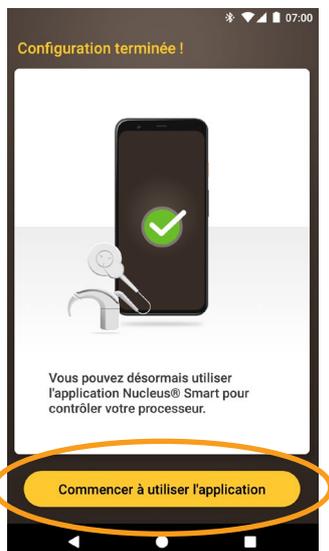

6 Vous pouvez maintenant utiliser **l'application Nucleus Smart** ! Pour plus d'informations, consultez le *Mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

REMARQUE


Pour jumeler d'autres appareils compatibles, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth sur les appareils déjà jumelés.

Déconnexion de votre/vos processeur(s)


Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :

- tout d'abord, **déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.


1 Ouvrez l'écran **Paramètres** de l'application.

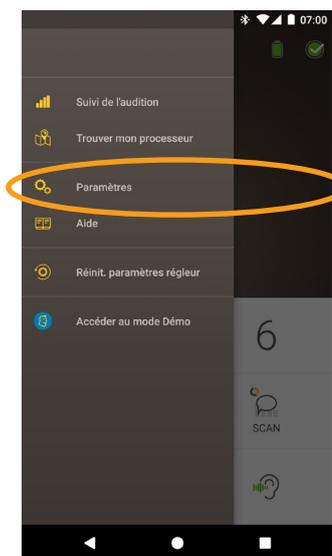


2 Appuyez sur **Paramètres du processeur**.

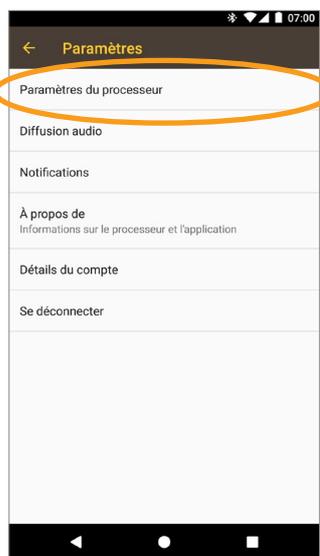

3 Appuyez sur **Déconnexion des processeurs**.

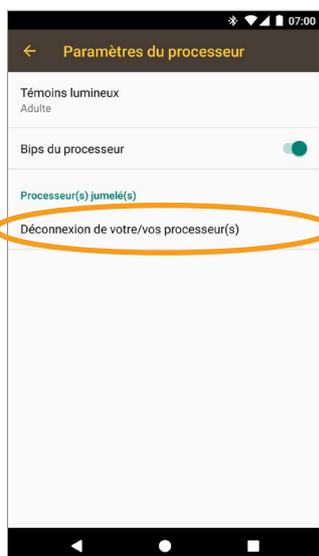


4 Appuyez sur **OUI**.

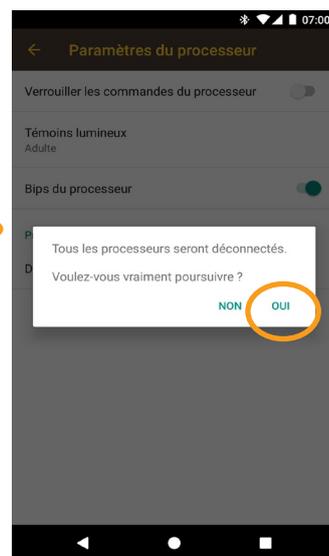


Vérification du statut de la diffusion

Pour vérifier votre statut de diffusion :


- 1 Ouvrez le menu de l'application.

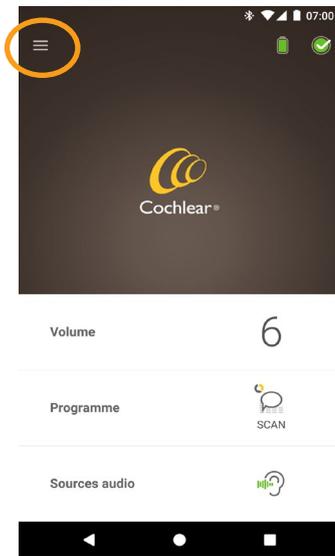

- 2 Appuyez sur Paramètres.

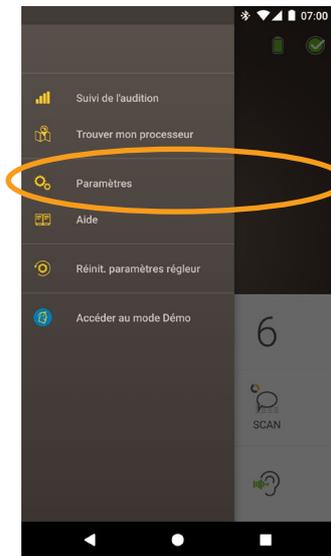

- 3 Appuyez sur Diffusion audio.

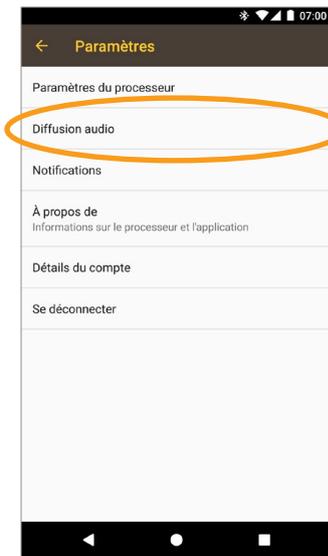

- 4 Si la diffusion audio n'est pas active, lisez les informations à l'écran pour plus de détails et cliquez sur les liens disponibles.

- Pour plus d'informations sur l'application, consultez le *mode d'emploi de l'application Kanso 2 Nucleus Smart*.
- Pour plus d'informations sur le processeur, consultez le *mode d'emploi du processeur Kanso 2*.
- Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : www.cochlear.com/