

## Guide de jumelage (pour iPhone/iPod touch/iPad P832154 version 3.0)

Ce guide vous indique comment jumeler votre ou vos processeurs Cochlear™ KANSO® 2 avec votre iPhone®, iPod touch® ou iPad® pour que vous puissiez diffuser du son et contrôler et surveiller votre/vos processeur(s). Vous pouvez également utiliser l'application Nucleus Smart\* pour contrôler et surveiller votre/vos processeur(s).

### Jumelage de votre ou vos processeur(s)


#### REMARQUES

- Ces instructions s'appliquent à la version iOS13. Les écrans des autres versions d'iOS peuvent différer légèrement.
- Si vous disposez d'autres processeurs ou prothèses auditives déjà jumelés, vous devez tout d'abord les déconnecter. Consultez la page 2 pour les instructions de déconnexion.


1 Sur votre appareil, appuyez sur Réglages.



2 Appuyez sur Accessibilité.

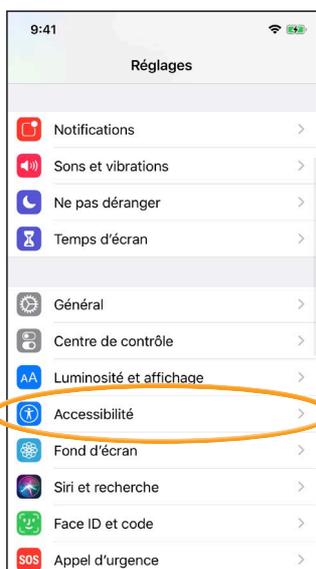

3 Appuyez sur Appareils auditifs.

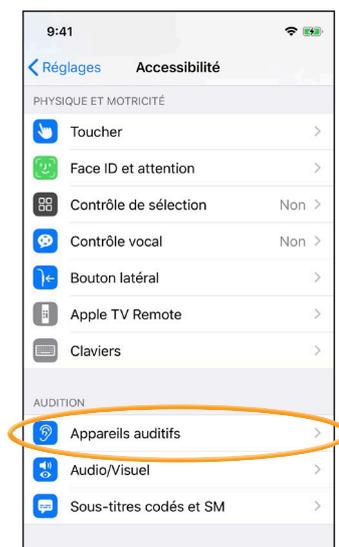

#### REMARQUE

Si l'écran *Appareils auditifs* s'ouvre, passez à l'étape 4.

#### REMARQUE

Ces instructions s'appliquent à la version iOS13. Pour les versions précédentes, vous devrez peut-être appuyer sur **Général** puis sur **Accessibilité**.

4 Si **Bluetooth** n'est pas activé, activez-le maintenant.



5 Désactivez puis Activez votre/vos processeur(s).

Si vous disposez de deux processeurs, effectuez cette opération pour chacun d'eux, l'un après l'autre.  
Votre appareil recherche votre/vos processeur(s)...

#### REMARQUE

Si vous utilisez un **processeur** et une **prothèse auditive compatible**, vous pouvez également les coupler de cette façon.

6 Appuyez sur votre nom lorsqu'il s'affiche à l'écran.



...À SUIVRE...

\* L'application Cochlear Nucleus Smart est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez le site [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility).

- 7 Appuyez sur **Jumeler** pour confirmer le jumelage.  
Si vous avez deux processeurs, ce message s'affiche deux fois :



- 8 Attendez que les voyants de jumelage de votre processeur s'allument.

#### Terminer le jumelage :

- **Lumière bleue clignotante** pendant 4 secondes    ...
- **Tonalité d'ondulation.**

- 9 Le jumelage a bien été effectué ! 



Vous pouvez maintenant configurer et utiliser **l'application Nucleus Smart** ! Pour plus de détails, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

#### REMARQUES

- **Interférences radio** : lorsque vous tentez de jumeler ou de connecter votre processeur avec votre iPhone, votre iPod touch ou votre iPad, il est possible que certains appareils produisent des interférences (par ex., des fours à micro-ondes, des routeurs sans fil ou des émetteurs audio TV). Si cela se produit, éloignez-vous de l'appareil concerné et réessayez.
- **Jumelage avec plusieurs appareils Apple** : vous pouvez jumeler votre processeur avec 5 appareils Apple compatibles au maximum, mais vous ne pouvez le contrôler qu'avec un seul à la fois.

## Déconnexion de votre/vos processeur(s)


Si vous modifiez votre ou vos processeurs, vous devez :

- **Déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- Puis **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.

- 1 Accédez à *Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs*.
- 2 Sélectionnez le ou les processeurs jumelés.
- 3 Appuyez sur *Oublier cet appareil* pour déconnecter le ou les processeurs.

#### REMARQUE

Si deux processeurs sont jumelés avec votre iPhone, votre iPod touch ou votre iPad, ils seront tous deux déconnectés.

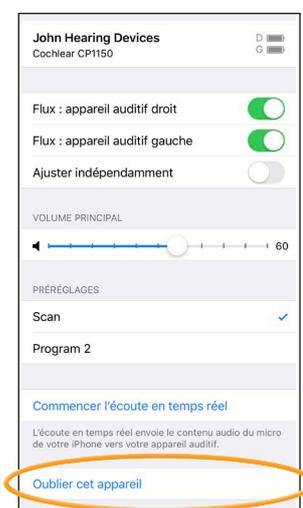

- Pour plus d'informations sur l'application, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.
- Pour plus d'informations sur le processeur, consultez le *mode d'emploi du processeur Kanso 2*.
- Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : [www.cochlear.com/](http://www.cochlear.com/)

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352  
**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555  
Fax: +61 2 9428 6352  
**ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770  
**Cochlear Americas** 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Apple, iCloud, iPhone, iPod touch et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

© Cochlear Limited 2020