

Cochlear™ Nucleus® Aqua+



Foire aux questions

Q Qu'est-ce que l'Aqua+ ?

R L'Aqua+ est une gaine de protection souple et flexible qui se glisse sur un processeur Nucleus® CP810 ou de la série CP900. Utilisée avec l'antenne Aqua+, elle permet aux utilisateurs d'IC de profiter des activités aquatiques qui requièrent une protection supplémentaire.

Q L'Aqua+ est-il étanche ?

R Oui. L'Aqua+ dispose d'un indice de protection IP68 pendant 2 heures jusqu'à 3 mètres de profondeur en eau calme. Cochlear a également effectué des tests approfondis en situation réelle pour simuler les bains dans l'eau savonneuse et la natation dans l'eau chlorée ou salée.

Q Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?

R L'Aqua+ est conçu pour fonctionner avec les processeurs Nucleus CP910 ou CP920 et avec le processeur Nucleus CP810 équipés de batteries rechargeables uniquement.

Q Puis-je utiliser mon antenne et mon câble d'antenne habituels avec l'Aqua+ ?

R Non, l'Aqua+ ne doit être utilisé qu'avec l'antenne Aqua+ indiquée. Ce câble d'antenne intégré est spécifiquement conçu pour nager dans tous les types d'eau, contrairement à votre antenne et à votre câble d'antenne habituels.

Q Pourquoi ne puis-je pas utiliser des piles zinc-air ?

R Les piles zinc-air ont besoin d'air pour rester actives et ne fonctionneront pas à l'intérieur de l'Aqua+ en raison de son étanchéité à l'air.

Q De quoi ai-je besoin pour utiliser l'Aqua+ ?

R L'Aqua+ doit être utilisé avec l'antenne Aqua+. Le kit de l'utilisateur Aqua+ comprend l'Aqua+, l'antenne Aqua+, l'aimant, l'étrier Mic Lock, le cordon de sécurité et l'étui de transport. Les nouveaux utilisateurs doivent commencer avec le kit de l'utilisateur Aqua+.

Q Comment puis-je acheter cet équipement ?

R Le kit de l'utilisateur Aqua+ contient tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l'Aqua+ pour la première fois et plonger sans attendre ! Si vous avez besoin de pièces détachées, vous pouvez contacter votre service clientèle Cochlear local.

Q Comment utiliser l'Aqua+ ?

R L'utilisateur glisse le processeur à l'intérieur de la gaine et attache l'antenne spécialement conçue pour l'Aqua+ au processeur. Il peut être porté normalement, derrière l'oreille. L'Aqua+ est conçu pour être utilisé sans dispositifs de maintien. Cependant, si une activité intensive est prévue, il est recommandé d'utiliser un dispositif de maintien tel que l'étrier Mic Lock fourni dans le kit.

Q Où puis-je utiliser l'Aqua+ ?

R L'Aqua+ a été conçu pour être utilisé lors de n'importe quelle activité aquatique jusqu'à une profondeur de 3 mètres. La plongée sous-marine n'est donc pas recommandée à une profondeur excédant 3 mètres.

Q L'Aqua+ peut-il être utilisé dans tous les types d'eau ?

R Oui, l'Aqua+ peut être utilisé dans l'eau savonneuse du bain ou sous la douche, dans les piscines au chlore, les piscines chlore/sel, l'eau salée et l'eau douce.

Q L'Aqua+ peut-il être utilisé dans un sauna ?

R L'Aqua+ a subi des tests à 70 °C et 95 % d'humidité. Les utilisateurs doivent consulter les modes d'emploi de leur processeur pour connaître les températures d'exploitation.

Q Quand dois-je remplacer l'Aqua+ (gaine) ?

R Les tests ont montré que l'Aqua+ (la gaine en silicone) peut être utilisé environ 50 fois. Il s'agit d'une moyenne en conditions de test : certains utilisateurs pourront l'utiliser plus longtemps, en fonction de leur mode d'utilisation et de la façon dont ils l'entretiennent. Vous devez inspecter la gaine Aqua+ à la recherche de signes d'usure ou de dommages avant et après chaque utilisation. Si de l'eau est détectée à l'intérieur de la gaine, cela indique un dommage et un remplacement est nécessaire.

Q Dois-je changer mes réglages MAP pour utiliser l'Aqua+ ?

R Les utilisateurs de la phase de test ont été satisfaits de leurs performances auditives sans modifier les réglages MAP ou les programmes. Certains utilisateurs peuvent préférer un programme directionnel standard, sans technologies SCAN, SNR-NR ni de réduction du bruit du vent avec l'Aqua+. Ce type de MAP équivaut au programme quotidien par défaut du CP810. Votre audioprothésiste peut créer un programme sur mesure si vous le désirez.

Q Puis-je porter l'Aqua+ et l'antenne Aqua+ en configuration standard ?

R L'Aqua+ et l'antenne Aqua+ sont conçus et testés pour une utilisation périodique dans l'eau. Cochlear ne recommande pas d'utiliser l'Aqua+ et l'antenne Aqua+ continuellement en configuration standard.

Q L'antenne Aqua+ nécessite-t-elle un aimant puissant ?

R Non. Les tests effectués par les utilisateurs indiquent que la puissance d'aimant normale convient à l'utilisation de l'Aqua+.

Q L'Aqua+ est-il recyclable ?

R En raison des différents matériaux composant les pièces de l'Aqua+, il ne peut être recyclé.

Q Que faire en cas de panne de l'Aqua+ ?

R Dans le cas improbable où un Aqua+ fermé serait défaillant, les processeurs conçus pour être utilisés avec l'Aqua+ disposent d'un indice de protection IP57, qui les protégera suffisamment en cas de fuite. La garantie du processeur reste valide si un processeur est endommagé pendant son utilisation conforme aux instructions fournies avec l'Aqua+.

Q Si je perds le processeur et l'Aqua+ en nageant, sont-ils couverts par la garantie ?

R Non. Le kit de l'utilisateur contient le cordon de sécurité, à utiliser dans les environnements où l'appareil peut tomber et se perdre, comme dans la mer, les parcs aquatiques, les rivières et les lacs.

Cochlear AG EMEA Headquarters
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel. : +41 61 205 0404, Fax : +41 61 205 0405
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2014 N37016F ISS1 AUG14 French Translation of N36949F ISS1