





# Cochlear™

## Mando a distancia Nucleus® CR110

### Guía rápida de uso

Hear now. And always



Spanish

### Su mando a distancia




- Enciende/apaga (mantenga pulsada)
- Comprueba el estado del procesador
- Vuelve al inicio

### Cómo . . .

#### Seleccionar el idioma del mando a distancia

Si el mando a distancia no está enlazado, al encenderlo aparece la pantalla de selección de idioma.

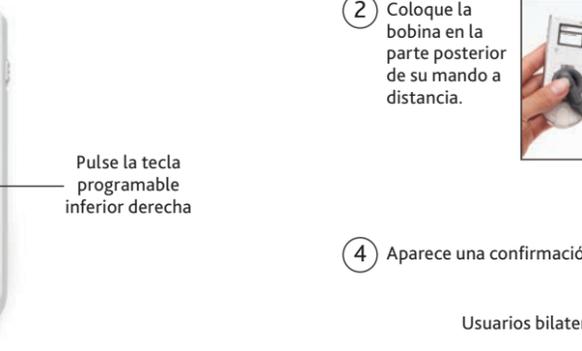


- Enciende/apaga (mantenga pulsada)
- Comprueba el estado del procesador
- Vuelve al inicio

### Cómo . . .

#### Enlazar su mando a distancia a su procesador

1 Asegúrese de que su procesador y su mando a distancia estén encendidos.

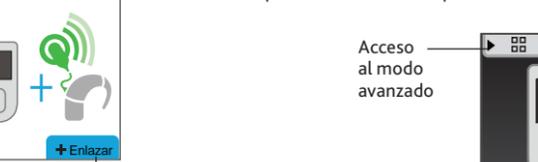


Usuarios bilaterales: repita los pasos 2 y 3.

### Cómo . . .

#### Seleccionar el modo simple o el avanzado

Al encender su mando a distancia por primera vez, éste estará automáticamente en modo simple. Puede acceder al modo avanzado pulsando la tecla programable superior izquierda cuando aparezca la pantalla de nivel de la pila del mando a distancia.

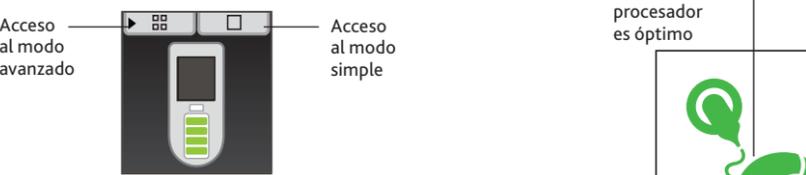

Para conmutar entre los modos avanzado y simple:

- 1 Apague su mando a distancia y vuelva a encenderlo.
- 2 Cuando aparezca la pantalla de nivel de la pila, pulse la tecla programable superior izquierda para seleccionar el modo avanzado, o la tecla programable superior derecha para seleccionar el modo simple.

### Cómo . . .

#### Comprobar el estado de su procesador

Para comprobar el estado de su(s) procesador(es), pulse la tecla Cochlear desde la pantalla de inicio.




\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Cambiar de programa

Pulse la tecla programable correspondiente al programa que quiera usar.

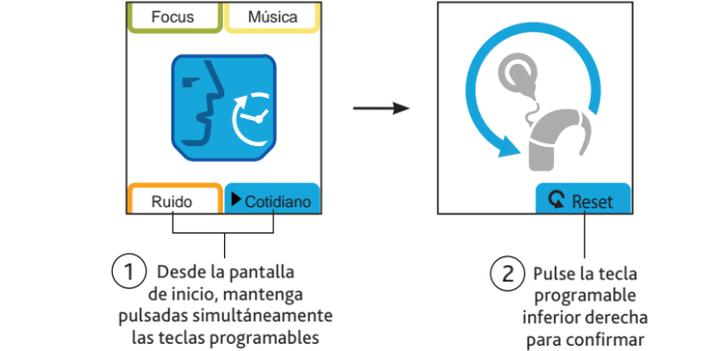


\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Restablecer su procesador a los valores que ajustó su especialista clínico

1 Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas programables inferiores izquierda y derecha.

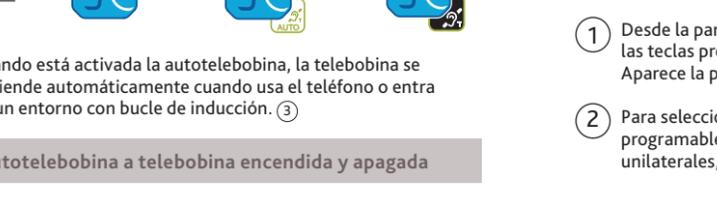

\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Encender la autotelebobina\*

Mantenga pulsada

1

2

3

Cuando está activada la autotelebobina, la telebobina se enciende automáticamente cuando usa el teléfono o entra en un entorno con bucle de inducción.

#### Cambiar de autotelebobina a telebobina encendida y apagada



\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Usar el modo de demostración

El modo de demostración le permite familiarizarse con las características de su mando a distancia. Para entrar al modo de demostración cuando su mando a distancia está ya enlazado con su procesador:

- 1 Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas programables superior derecha e inferior izquierda. Aparece la pantalla del modo de demostración.
- 2 Para seleccionar funciones avanzadas bilaterales, pulse la tecla programable inferior izquierda. Para seleccionar funciones básicas unilaterales, pulse la tecla programable inferior derecha.



Para dejar de usar el modo de demostración, apague su mando a distancia y vuelva a encenderlo.

### Cómo . . .

#### Compruebe el indicador de estado

Indicador

Qué significa


- Su procesador está dentro de la distancia operativa de su mando a distancia y se comunican entre sí.
- Su procesador no se comunica con el mando a distancia. Por ejemplo, no están dentro de sus distancias operativas mutuas, o no están enlazados.
- Su mando a distancia está cargándose.
- En naranja intermitente puede significar que:
  - Una alerta visual necesita su atención.
  - La pila de su mando a distancia tiene poca carga o está gastada.
  - El software de su mando a distancia necesita actualización. Contacte con su especialista clínico.
- Su mando a distancia está completamente cargado y el cable USB todavía está conectado.

\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Acceder a las funciones adicionales (sólo en modo avanzado)

Para acceder a la pantalla de estado del procesador, pulse la tecla Cochlear desde la pantalla de inicio.

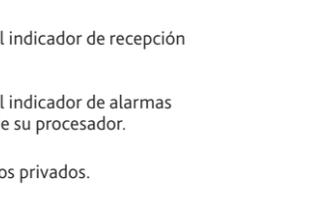

\* Su especialista clínico debe activar esta función.

### Cómo . . .

#### Ajustar el procesador (sólo en modo avanzado)

Icono

Qué significa

- Ajustar la proporción de la mezcla entre telebobina y micrófono.
- Ajustar la proporción de la mezcla entre accesorio y micrófono.
- Cambiar las preferencias del indicador de recepción de sonido de su procesador.
- Cambiar las preferencias del indicador de alarmas y de pulsaciones de teclas de su procesador.
- Activar o desactivar los tonos privados.

Para más información acerca de su mando a distancia, vea la guía del usuario del mando a distancia CR110.