

Cochlear™

Beknopte
handleiding voor
de Nucleus®
CP910- en CP920-
geluidsprocessors

- ☑ Eerste stappen
- ☑ Beknopte handleiding



Hear now. And always



Beschrijving

De Cochlear™ Nucleus® CP910- of CP920-geluidsprocessor werkt samen met het cochleaire implantaat om geluid naar het oor te zenden.

OPMERKING

Meer informatie en waarschuwingen vindt u in de handleiding van de CP910- en CP920-geluidsprocessor.



Geluidsprocessor

**Microfoons en
beschermers**

Indicatielicht

Bovenste toets

Onderste toets

Oorhaak

Serienummer

Zendspoel

Zendspoelmagneet

Zendspoelsnoer

Processordeel

Inplugbare
accessoire-
aansluiting
(alleen CP910)

**Standaard
oplaadbare
batterijmodule**




BESCHRIJVING

Batterij vergrendelen/ ontgrendelen


Vergrendel de batterij van de CP910- of CP920-processors ter beveiliging.



Open het klepje van de accessoire-aansluiting voorzichtig *(alleen CP910)*.

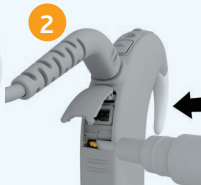


Links voor vergrendelen/
rechts voor ontgrendelen.

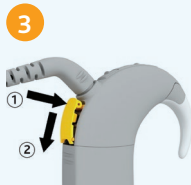


Sluit het klepje door het eerst in het scharnier vast te drukken *(alleen CP910)*.

Oplaadbare batterij verwijderen/bevestigen

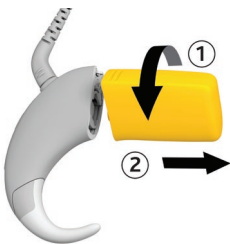

Verwijderen

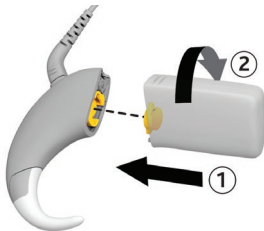

Bevestigen

Processor schakelt
automatisch in.




Oplaadbare batterijmodule vervangen



Plaats de batterij in de aansluiting op
de Cochlear Nucleus-batterijlader.
Draai met de klok mee.

Sluit de batterijlader aan op de stroomadapter en steek de stekker in het stopcontact.

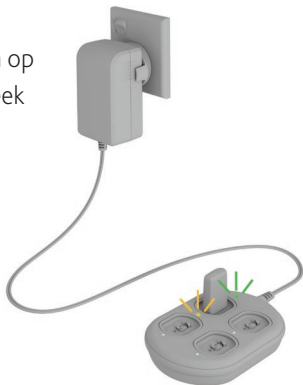

LICHT

BETEKENIS



Constant oranje

De batterijmodule is aan het opladen.



Constant groen

De batterijmodule is opgeladen.




STROOM


Wegwerpbatterijen vervangen




Draai de schroef tegen de klok in om het beveiligde batterijdekseltje te ontgrendelen en met de klok mee om het te vergrendelen.

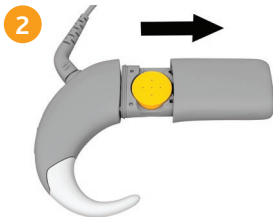

Schuif het batterijdekseltje open.

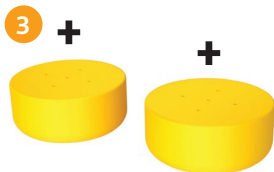

Plaats twee nieuwe p675 high power zink-lucht wegwerpbatterijen (geen zilveroxide of alkaline), met de vlakke zijde naar boven.

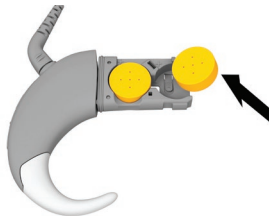

Processor schakelt automatisch in.



In- en uitschakelen

Sluit de batterij aan of
druk de onderste toets
kort in om in te
schakelen.

Houd de onderste toets
ongeveer twee seconden
ingedrukt om uit te
schakelen.



Toetsen van de processor vergrendelen

Druk beide toetsen tegelijkertijd kort in om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen. (Oranje licht betekent dat de toetsen vergrendeld zijn.)



Programma's wijzigen

Druk de onderste toets kort in om programma's te wijzigen.



Het aantal pieptonen of
groene lichtflitsen
(indien ingesteld door uw
specialist) geeft het
programmanummer aan.



Draadloze accessoires

Gebruik de draadloze cochleaire accessoires (mini-microfoon, tv-streamer, telefoonclip) om draadloze audio-invoer op uw geluidsprocessor te ontvangen.

OPMERKING

Voordat u audio kunt streamen, moet u eerst de draadloze accessoire aan uw processor koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de draadloze cochleaire accessoire voor meer informatie.



OPMERKING

Met de regelaars op de telefoonclip kunt u bellen en gebeld worden.





Druk de bovenste knop gedurende langere tijd in om audio te streamen vanaf de mini-microfoon of tv-streamer.

Druk de knop kort in om uit te schakelen.

Blauw: de draadloze accessoire streamt audio.
Groen: microfoons actief.

**TIP**

Druk de toets opnieuw lang in om verder te gaan naar de volgende gekoppelde draadloze accessoire.



Inplugbare audio-accessoires

(alleen CP910)



Open het klepje van de accessoire-aansluiting voorzichtig.



Steek de accessoireconnector in de accessoire-aansluiting.



Steek het andere uiteinde van het accessoire snoer in een compatibel apparaat, bijv. een muzikspeler.

TIP

Als er inplugbare audio-accessoires zijn aangesloten, kunt u de bovenste toets kort indrukken om tussen audio-accessoires en microfoons te wisselen.



Luisterspoel

Luister naar ringleidingen en hoor stemmen door de telefoon met de luisterspoel. Uw specialist kan de processor instellen met een handmatige luisterspoel en een automatische luisterspoel. De automatische luisterspoel herkent het luisterspoelsignaal automatisch. Indien u een telefoon gebruikt die compatibel is met een luisterspoel of als u het bereik van een ringleiding betreedt, schakelt de automatische luisterspoel naar 'ontvangst'. Indien er geen signaal is, bijv. als u buiten het bereik van een ringleiding bent, schakelt de automatische luisterspoel naar 'stand-by' (geen ontvangst).

Druk de bovenste toets kort in om de handmatige luisterspoel in- of uit te schakelen.

Blaauw: luisterspoel/
accessoire actief.

Groen: microfoons actief.



Lichten

Alledaags gebruik

LICHT	BETEKENIS
	Processor knippert als hij geluid ontvangt van luisterspoel/audio-accessoire (indien ingesteld door uw specialist).
	De processor knippert tijdens het ontvangen van geluid van de microfoons (indien ingesteld door uw specialist).
	Inschakelen en programma's wijzigen. Het aantal lichtflitsen geeft het nummer van het actuele programma aan.
	Processor uitschakelen.

Vergrendelingstoetsen

LICHT	BETEKENIS
	Toetsen van de processor vergrendelen.
	Toetsen van de processor ontgrendelen.
	Toetsen van de processor zijn vergrendeld.



Draadloze accessoires

LICHT	BETEKENIS
	Succesvol gekoppeld aan draadloze accessoire.

Luisterspoel/inplugbare audio-accessoires

LICHT	BETEKENIS
	Er wordt gewisseld van microfoon naar luisterspoel/inplugbare audio-accessoire.
	Er wordt gewisseld van luisterspoel/inplugbare audio-accessoire naar microfoon.

Waarschuwingen

LICHT	BETEKENIS
	De processor knippert als de zendspoel niet is gekoppeld (of is verbonden met het verkeerde implantaat).
	Batterij van de processor is leeg. Batterij opladen.
	Fout. Neem contact op met uw specialist. Blijft branden tot het probleem is opgelost.





Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus en het elliptische logo zijn altijd handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

415003 ISS3

Dutch translation of 402592 ISS7 MAR15