

Cochlear™

Beknopte handleiding
bij de Nucleus®
CR210-basis-
afstandsbediening

- ☒ Eerste stappen
- ☒ Beknopte handleiding



Hear now. And always



Beschrijving

Gebruik de Cochlear™ Nucleus® CR210 basisafstandsbediening voor het bedienen van de meest gebruikte functies van uw Cochlear Nucleus CP910, CP920, of Kanso (CP950) geluidsprocessor.*

* Niet alle producten zijn in alle landen goedgekeurd.

OPMERKING

Meer informatie en waarschuwingen vindt u in de *handleiding bij de CR210-basisafstandsbediening*.




CR210-basisafstandsbediening



Batterij vervangen

Vervang de batterij zodra de basisafstandsbediening aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

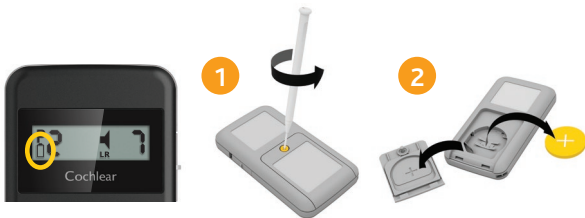

Als de basisafstandsbediening aangeeft dat de batterij bijna leeg is:

Schroef het dekseltje los met een kruiskop-schroevendraaier.

Verwijder het dekseltje en de oude batterij.



OPGELET

Gebruik **UITSLUITEND** wegwerpbare CR2032 of 5004LC lithium-knoopcelbatterijen van 3 V in uw basisafstandsbediening.



Plaats voorzichtig een nieuwe batterij, met de pluszijde '+' naar boven.



Plaats het dekseltje terug met de onderzijde eerst.



Schroef het dekseltje weer vast.



Inschakelen

Schuif de schakelaar omhoog om de basisafstandsbediening in te schakelen.



Uitschakelen

Schuif de schakelaar omlaag om de basisafstandsbediening uit te schakelen.



INSCHAKELLEN

Koppelen

Door het koppelen kunnen twee apparaten met elkaar communiceren.



Als de basisafstandsbediening aangeeft dat deze niet gekoppeld is:

Schakel zowel de processor als de basisafstandsbediening in.

Plaats de zendspool/processor op de achterkant van de basisafstandsbediening.



Basisafstands-
bediening geeft
aan dat de
koppeling
gaande is.



Basisafstands-
bediening geeft
aan dat deze
gekoppeld is.



Herhaal
stap 2–4 als u
een tweede
processor hebt.



INSCHAKELEN

Programma's wijzigen

Volgend
programma

Vorig programma



Volume/gevoeligheid aanpassen



Volume of
gevoeligheid
verhogen (zoals
ingesteld door
uw specialist)

Volume of
gevoeligheid
verlagen

Draadloze accessoires

Gebruik uw afstandsbediening om het streamen van audio te starten of te stoppen als er een draadloos cochleair accessoire (mini-microfoon of tv-streamer) is gekoppeld met uw processor.

Display toont draadloos accessoire:



Draadloos accessoire inschakelen:



Eén keer lang indrukken

Draadloos accessoire uitschakelen:



Eén keer lang indrukken

Inplugbare audio-accessoires

Gebruik uw basisafstandsbediening om het accessoire uit en weer in te schakelen als er een inplugbaar audio-accessoire is aangesloten.

Display toont
inplugbaar
audio-accessoire:



Inplugbaar
audio-accessoire
uitschakelen:



Eén keer kort
indrukken

Inplugbaar
audio-accessoire
inschakelen:



Eén keer kort
indrukken

Luisterspoel

Luister naar ringleidingen en hoor stemmen door de telefoon met de luisterspoel of de automatische luisterspoel (indien beschikbaar). De automatische luisterspoel herkent het luisterspoelsignaal automatisch.

Luisterspoel
inschakelen:




Eén keer kort
indrukken

Luisterspoel in
automatische
modus zetten:



Twee keer kort
indrukken

Luisterspoel
uitschakelen:

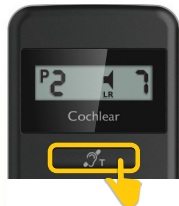

Eén keer kort
indrukken

Onderhoud

Reinig uw afstandsbediening met een zachte droge doek. Houd uw afstandsbediening droog.





Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus en het elliptische logo zijn altijd handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

415415 ISS4

Dutch translation of 402610 ISS8 APR16