



ชุดดูแลและบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus®

การทำความสะอาดตามปกติ

ใช้รายการสิ่งของที่อยู่ในชุดดูแลและบำรุงรักษาทำความสะอาดตามปกติเป็นประจำ ซึ่งควรมีอายุการใช้งานหกเดือน



ทุกวัน

ก่อนเก็บเครื่องแปลงสัญญาณไว้ในกล่องกำจัดความชื้น (Dry Aid Kit) ในช่วงเวลากลางคืน ให้เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกและรอยเปื้อนออกด้วยผ้าเนื้อนุ่ม



ทุกสัปดาห์

ทำความสะอาดหน้าสัมผัสกับแบตเตอรี่บนเครื่องแปลงสัญญาณ และหน้าแบตเตอรี่ ด้วยแปรงทำความสะอาด

ทำความสะอาดเข้าและร่องของตัวประเมินผลด้วยที่บีบลม




คำแนะนำ: ทำความสะอาดตามปกติในช่วงกลางคืน เช่น ทุกคืนวันจันทร์



ทุกเดือน

เช็ดทำความสะอาดหน้าสัมผัสกับแบตเตอรี่บนเครื่องแปลงสัญญาณ และหน้าแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์

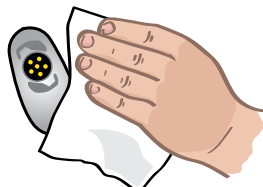

การดูแลรักษาต่อเนื่อง


นอกจากการทำความสะอาดตามปกติเป็นประจำโดยใช้ชุดดูแลและบำรุงรักษานี้
อย่าลืมในส่วนการดูแลรักษาต่อเนื่องของเครื่องแปลงสัญญาณเสียงอีกด้วย

คำแนะนำ: จดรายการต่างๆ ในสมุดบันทึกเพื่อเตือนความจำเรื่องที่ต้องดูแล
เป็นประจำ



ทุกเดือน

ตรวจสอบที่คล้องหู หรือ Snugfit
ของคุณว่าล็อกหรือหลวมหรือไม่
เปลี่ยนใหม่ หากจำเป็น

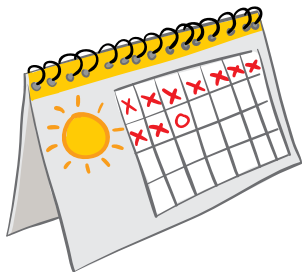

ทุกๆ สองเดือน

เปลี่ยนแท่งดูดความชื้น
ในกล่องกำจัดความชื้นของคุณ



ทุกๆ สองหรือสามเดือน*

เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นของไมโครโฟน
ที่ตัวเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ

*โปรดดูคำแนะนำเฉพาะเพิ่มเติมได้
ในคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องแปลง
สัญญาณเสียง



Cochlear, Hear now. And always
โลโก้ Nucleus และโลโก้รูปวงรีซ้อนเป็น
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมาย
การก้ำกัวยื่นของ Cochlear
Limited

© Cochlear Limited 2014
499983 ISS2
Thai translation of
480379 ISS2 MAR14

Hear now. And always


Cochlear®