

Diagram illustrating the controls and functions of the CodaGo device:

- Statusindicator controleren
- Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
- Startscherm
- Schermtaatsen
- Gevoeligheid instellen
- Gevoeligheid regelt het laagste geluidsniveau dat door de microfoons wordt opvangen.

Additional text at the bottom of the diagram:

- aan/uit zetten (indrukken en ingedrukt houden)
- controleer processorstatus
- terug naar startscherm

De afstandsbediening en processor koppelen

- 1 Controleer of de processor en de afstandsbediening ingeschakeld.
- 2 Plaats de zendspoel op de achterkant van de afstandsbediening.
- 3 Druk op de achterste rechterschermtaats.
- 4 Er verschijnt een koppelbevestiging. ✓

Bilaterale gebruikers: Herhaal stappen 2 en 3.

Eenvoudige of geavanceerde modus selecteren

De afstandsbediening staat automatisch in de eenvoudige modus als u de afstandsbediening voor het eerst inschakelt. U kunt de geavanceerde modus selecteren, door op de bovenste linkerschermtoets te drukken als het scherm voor de batterijstatus van de afstandsbediening verschijnt.

Diagram illustrating the selection of the advanced or simple mode on the remote control. The remote control is shown with the top buttons highlighted. The left button is labeled "Selecteren van de geavanceerde modus" (Select advanced mode) and the right button is labeled "Selecteren van de eenvoudige modus" (Select simple mode).

Tussen de geavanceerde en de eenvoudige modus schakelen:

- 1 Schakel de afstandsbediening uit en weer in.
- 2 Als het scherm voor de batterijstatus verschijnt, drukt u op de bovenste linkerschermtoets om de geavanceerde modus te selecteren of op de bovenste rechterschermtoets om de eenvoudige modus te selecteren.

De status van de processor controleren

Druk vanuit het startscherm op de Cochlear-toets om de status van de processor(s) te controleren.

Processor-status is OK

Batterijstatus van processor

Audio-input niveau

en

le Cochlear-toets om de
ntroleren.

Batterijstatus
van processor

Audio-input
niveau

Programma's veranderen

Druk op de schermtoets die bij het programma
gebruiken.

Gebruik **Focus** om in
luide omgevingen te
focussen op wat een
bepaalde persoon
of een kleine groep
mensen zeggen.

Gebruik **Lawaai**
bij voortdurend
achtergrondlawaai
uit alle richtingen.

De processor terugzetten op de door de specialist ingestelde fabriekswaarden.

Automatische luisterspoel inschakelen*

Indrukken en ingedrukt houden

① ② ③

Als de automatische luisterspoel is geactiveerd, schakelt de luisterspoel automatisch in wanneer u de telefoon gebruikt of een omgeving met ringleiding betreedt. ③

Van automatische luisterspoel naar luisterspoel „aan” en „uit” schakelen

Kort indrukken

① ② ③

Automatische luisterspoel* aan Luisterspoel* uit Luisterspoel uit


* Uw specialist moet deze functie activeren.

Demo-modus

In de demo-modus kunt u vertrouwd raken met de functies op de afstandsbediening.

De demo-modus selecteren als de afstandsbediening al aan de processor is gekoppeld:

- 1 Houd vanuit het startscherm de bovenste rechterschermtaets en de onderste linkerschermtaets samen ingedrukt. Het scherm voor de demo-modus verschijnt.
- 2 Om bilaterale geavanceerde functies te selecteren, drukt u op de onderste linkerschermtaets. Om unilaterale basisfuncties te selecteren, drukt u op de onderste rechterschermtaets.

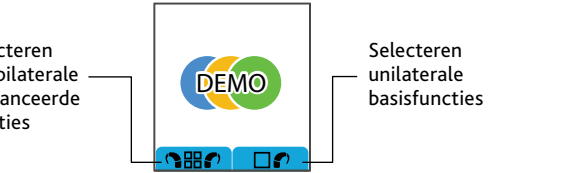

Selecteren van bilaterale geavanceerde functies

Selecteren unilaterale basisfuncties

Om de demo-modus te stoppen, schakelt u de afstandsbediening uit en weer in.

Betekenis	Toegang krijgen tot de processor
De processor is binnen het werkingsbereik van de afstandsbediening en ze communiceren met elkaar.	Druk vanuit het statusscherm op de knop met de afstandsbediening.
De processor communiceert niet met de afstandsbediening. Ze zijn bijvoorbeeld niet binnen elkaars werkingsbereik of ze zijn niet gekoppeld.	Druk vanuit het statusscherm op de knop met de afstandsbediening.
De afstandsbediening wordt opgeladen.	Programmeer de processor selecteer de afstandsbediening.
Een oranje knipperlicht kan betekenen:	Statusscherm – de afstandsbediening is niet gekoppeld.
• Er is een visuele waarschuwing. • De batterij van de afstandsbediening is leeg of bijna leeg. • De software van de afstandsbediening moet eventueel worden bijgewerkt. Neem contact op met uw specialist.	Statusscherm – de afstandsbediening is niet gekoppeld.
De afstandsbediening is volledig opgeladen en de USB-kabel is nog aangesloten.	

Knop op de Cochlear-toets om het processor weer te geven.

- Programmeermenu afstandsbediening selecteren
- Interactieve hulpguids selecteren

Icoon	Betekenis
	Mixverhouding van T
	Mixverhouding van A
	Voorkeuren voor processor wijzigen
	Voorkeuren voor toetsdruk wijzigen
	Persoonlijke tonen

Voor meer informatie over de CR110 afstandsbediening:

oel en microfoon instellen.

re en microfoon instellen.

r „Geluid aan" van de

r voor alarmsignalen en

of uitschakelen.

bediening, zie de handleiding