

Cochlear™ Wireless Mini Microphone (mini-microfoon)

Beknopte handleiding voor gebruikers van de CP900 serie




Kenmerken van de mini-microfoon

Beter horen op afstand en in lawaaiige situaties, zoals:

- in vergaderingen;
- reizen met de auto, bus of trein;
- eten in een restaurant;
- deelnemen aan een training op de sportschool.

Hoe werkt het?

Geef de mini-microfoon aan de persoon naar wie u wilt luisteren. Vraag deze persoon de microfoon dicht bij de mond te plaatsen. Dit kan door het apparaat op de kleding te bevestigen met de clip aan de achterkant. Activeer vervolgens de streamingfunctie op de geluidsprocessor van de CP900 serie (zie instructies hieronder).

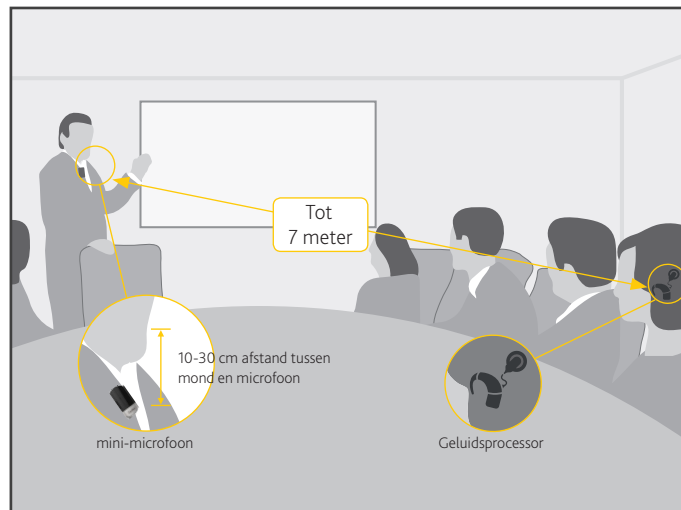

De tv of radio beter horen

Hoe werkt het?

Plaats de mini-microfoon bij de luidspreker van de tv of radio. U hoeft de microfoon niet aan te sluiten op een hoofdtelefoonuitgang.




Rechtstreeks muziek of geluid streamen naar de geluidsprocessor

Hoe werkt het?

Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde verbinding kabel aan op het ingangskanaal van de mini-microfoon en het andere uiteinde op het uitgangskanaal van het audioapparaat, zoals een computer, MP3-speler of stereo-installatie.



Productoverzicht

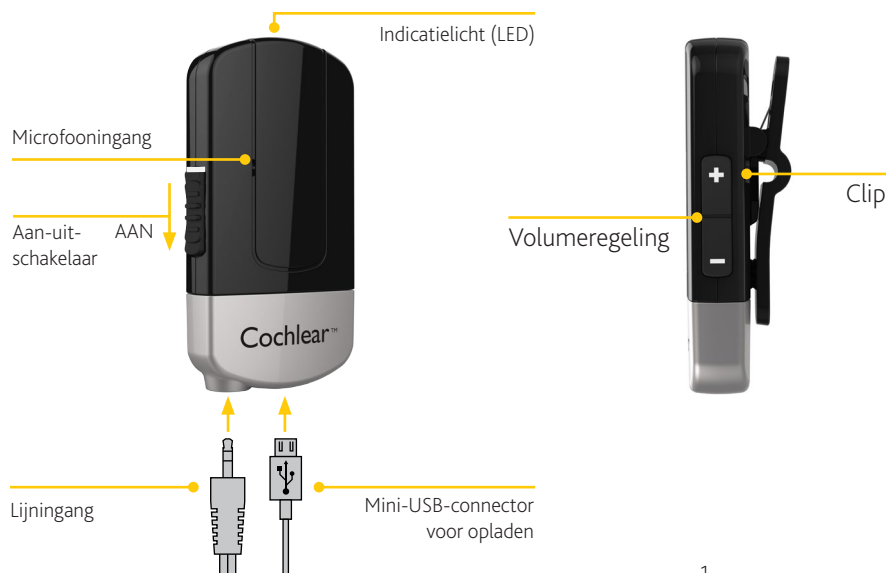

Aan de slag

De batterij opladen:

Steek de mini-USB-stekker van de meegeleverde oplaadkabel in de ingang van de mini-microfoon. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer, of gebruik de meegeleverde adapter om de kabel aan te sluiten op een stopcontact.

Voordat u de mini-microfoon gaat gebruiken, moet deze minimaal 3 uur worden opgeladen, ook al geeft het indicatielampje aan dat het apparaat helemaal is opgeladen. De batterij kan niet worden overladen.

Opmerking: Gemiddeld werkt de mini-microfoon maximaal 8,5 uur nadat deze is opgeladen.

Koppelen met de geluidsprocessor van de CP900 serie

- A** Schakel de geluidsprocessor van de CP900 serie uit.


Verwijder de geluidsprocessor van uw oor.
Houd de onderste toets twee seconden ingedrukt.



- B** Schakel de mini-microfoon in en verwijder het zilverkleurige kapje.



- C** Druk met de punt van een pen of een vergelijkbaar voorwerp eenmaal op de koppelingsknop van de mini-microfoon.

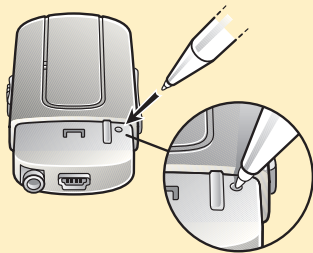

- D** Het LED-lampje knippert nu elke 2 seconden geel en de mini-microfoon bevindt zich gedurende 20 seconden in de koppelingsmodus.



- E** Schakel de geluidsprocessor in terwijl de koppelingsmodus actief is (20 seconden).

Druk op de onderste toets.

Er knippert een blauw indicatielicht om aan te geven dat de koppeling is geslaagd.



- F** U kunt maximaal drie Cochlear draadloze accessoires koppelen met de geluidsprocessor(s).

Voor het koppelen van een mini-microfoon op kanaal 2 drukt u bij stap **C** tweemaal op de koppelingsknop. Het LED-lampje knippert elke 2 seconden tweemaal geel.

Voor het koppelen van een mini-microfoon op kanaal 3 drukt u bij stap **C** driemaal op de koppelingsknop. Het LED-lampje knippert elke 2 seconden driemaal geel.

Ondersteuning

Raadpleeg de meegeleverde handleiding en de handleiding van de draadloze accessoires voor alle informatie over de mini-microfoon.

Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor alle informatie over de geluidsprocessor uit de Cochlear CP900 serie.

Bezoek voor verdere ondersteuning en video's de website van Cochlear: www.cochlear.com

De mini-microfoon gebruiken

Starten met streamen via de geluidsprocessor

A Schakel de geluidsprocessor en mini-microfoon in.



Houd de bovenste knop van de geluidsprocessor één keer lang ingedrukt. Op de geluidsprocessor gaat een blauw lampje branden om aan te geven dat er geluid wordt gestreamd.

B Een ander kanaal selecteren of het streamen beëindigen.



Houd de bovenste toets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.

Druk kort op de bovenste toets om het streamen te beëindigen.

Starten met streamen via de CR230 afstandsbediening


Methode 1: Schakel de geluidsprocessor en mini-microfoon in. Schakel de CR230 afstandsbediening in.



Houd de luisterspoeltoets ingedrukt.
Tip! Houd de toets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.
De mini-microfoon begint met streamen.
Druk kort op de luisterspoeltoets om het streamen te beëindigen.

OF

Methode 2: Schakel de geluidsprocessor en mini-microfoon in. Schakel de CR230 afstandsbediening in.

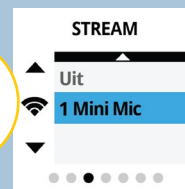

Druk in het startscherm op de pijltoets rechts om naar het scherm Streamen te gaan.
Blader in de lijst omlaag naar het kanaal dat u wilt gebruiken en druk op **OK**.
Wanneer uw audioapparaat is ingeschakeld, begint de mini-microfoon met streamen.
Selecteer de optie **Uit** in het selectiescherm Streamen om het streamen te stoppen.


Starten met streamen via de CR210 basisafstandsbediening

A Schakel de geluidsprocessor en mini-microfoon in. Schakel de CR210 basisafstandsbediening in.



Houd de luisterspoeltoets ingedrukt.
De mini-microfoon begint met streamen.

B Een ander kanaal selecteren of het streamen beëindigen.

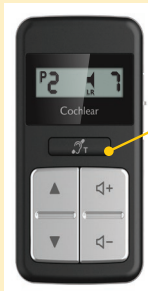

Houd de luisterspoeltoets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.

Druk kort op de luisterspoeltoets om het streamen te beëindigen.

Cochlear draadloze accessoires:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 systeem:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regionale kantoren:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus in Chinese tekens, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, het elliptische logo en Whisper zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix en WindShield zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015

544166 ISS2

Dutch translation of 532743 ISS5 MAR15