

Cochlear™ Wireless TV Streamer (tv-streamer)


Beknopte handleiding voor gebruikers van de CP900 serie



Kenmerken van de tv-streamer

- Ontdek de uitstekende geluidskwaliteit bij rechtstreeks streamen vanaf uw tv, stereo-installatie, computer of een vergelijkbaar apparaat naar de geluidsprocessor uit de CP900 serie.
- Ondersteunt zowel een analoog als een digitaal ingangssignaal.
- Maakt automatisch opnieuw verbinding als u de kamer verlaat en binnen 5 minuten terugkeert.
- Na een eenmalige installatie kunt u met één klik tv kijken.

U kunt de tv-streamer gewoon aansluiten op het stopcontact en rechtstreeks verbinden met uw audioapparaat. De tv-streamer streamt stereogeluid via de geluidsprocessors vanaf een afstand van maximaal 7 meter.

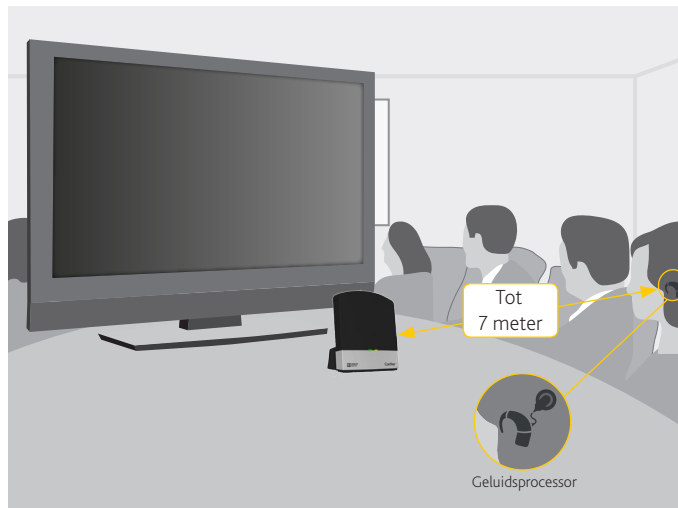

Productoverzicht



Aan de slag

Het volume aanpassen

Hoe werkt het?

Gebruik de volumeregeling op de tv-streamer om het volume aan te passen.

Zorg dat de geluidsprocessors optimaal zijn afgesteld voordat u de volume-instelling wijzigt met de volumeregeling. In de meeste gevallen hoeft u deze afstelling slechts één keer uit te voeren, omdat de tv-streamer het laatst ingestelde volumeniveau opslaat.

Regeling mono/stereo

Hoe werkt het?

Met de tweestandenschakelaar Mono/Stereo kunt u de instelling Stereo of Mono kiezen voor het streamen van geluid.

Voor tweezijdige gehoorondersteuning moet de schakelaar bij voorkeur worden ingesteld op de Stereo-stand.


Voor eenzijdige gehoorondersteuning moet deze worden ingesteld op de Mono-stand.

Koppelen met de geluidsprocessor van de CP900 serie

- A** Sluit de tv-streamer aan op het stopcontact met behulp van het netsnoer en de micro-USB-aansluiting op de tv-streamer.



- B** Steek de miniplug van de audiokabel in de audio-ingang van de tv-streamer en sluit deze aan op de geluidsbron.

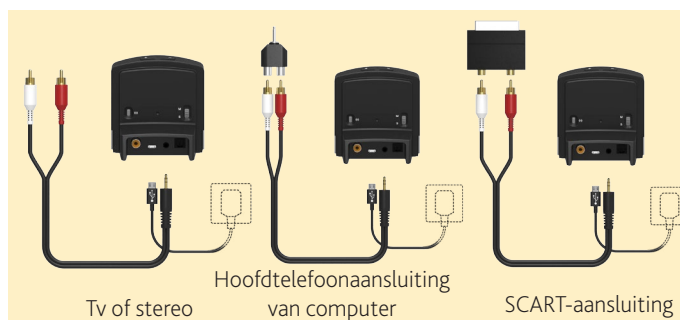


- C** Schakel de geluidsprocessor van de CP900 serie uit.




- D** Druk eenmaal op de koppelingsknop van de TV Streamer.



- E** De tv-streamer bevindt zich nu in de koppelingsmodus.

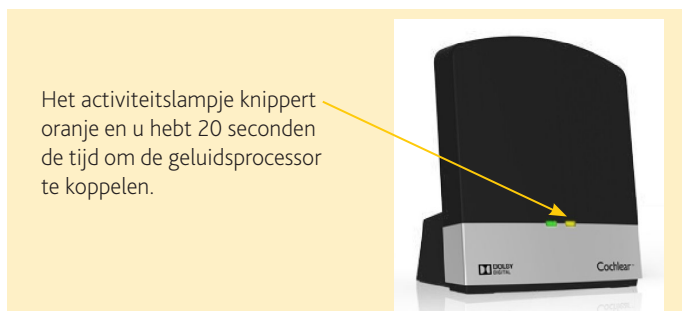

- F** Schakel de geluidsprocessor in terwijl de koppelingsmodus actief is.

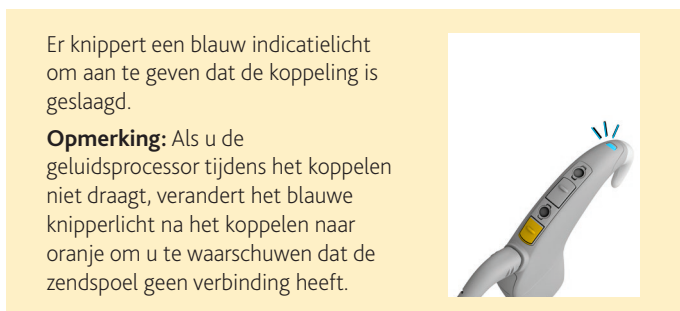

Ondersteuning

Raadpleeg de meegeleverde handleiding bij de tv-streamer en de handleiding van de draadloze accessoires voor alle informatie over de tv-streamer. Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor alle informatie over de geluidsprocessor uit de Cochlear CP900 serie. Bezoek voor verdere ondersteuning en video's de website van Cochlear: www.cochlear.com

De tv-streamer gebruiken

Starten met streamen via de geluidsprocessor

A Schakel de geluidsprocessor en de tv-streamer in.



Houd de bovenste knop van de geluidsprocessor één keer lang ingedrukt. Op de geluidsprocessor gaat een blauw lampje branden om aan te geven dat er geluid wordt gestreamd.

B Een ander kanaal selecteren of het streamen beëindigen.



Houd de bovenste toets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.

Druk kort op de bovenste toets om het streamen te beëindigen.

Starten met streamen via de CR230 afstandsbediening

Methode 1: Schakel de geluidsprocessor en de tv-streamer in. Schakel de CR230 afstandsbediening in.




Houd de luisterspoeltoets ingedrukt.

Tip! Houd de toets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.

Wanneer uw audioapparaat is ingeschakeld, begint de tv-streamer met streamen.

Druk kort op de luisterspoeltoets om het streamen te stoppen.

OF

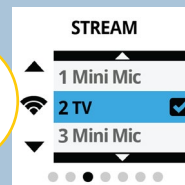

Druk in het startscherm op de pijltoets rechts om naar het scherm Streamen te gaan.

Blader in de lijst omlaag naar het kanaal dat u wilt gebruiken en druk op **OK**.

Wanneer uw audioapparaat is ingeschakeld, begint de tv-streamer met streamen.

Selecteer de optie **Uit** in het selectiescherm Streamen om het streamen te stoppen.

Starten met streamen via de CR210 basisafstandsbediening

A Schakel de geluidsprocessor en de tv-streamer in. Schakel de CR210 basisafstandsbediening in.



Houd de luisterspoeltoets ingedrukt.

Wanneer uw audioapparaat is ingeschakeld, begint de tv-streamer met streamen.

B Een ander kanaal selecteren of het streamen beëindigen.



Houd de luisterspoeltoets twee keer lang ingedrukt om kanaal 2 te selecteren en drie keer om kanaal 3 te selecteren.

Druk kort op de luisterspoeltoets om het streamen te stoppen.

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus in Chinese tekens, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, het elliptische logo en Whisper zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix en WindShield zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2015

544168 ISS2

Dutch translation of 532745 ISS4 MAR15