

ペア設定ガイド (iPhone/iPod touch/iPad 用バージョン 3.0)

本書では、Cochlear[™] (コクレア[®]) Nucleus 7 サウンドプロセッサと iPhone[®]、iPod touch[®]、または iPad[®] をペア設定する方法について説明します。これにより、サウンドプロセッサへの音声のストリーミングや、サウンドプロセッサの操作およびモニタリングが行えるようになります。また、一部の機器では Nucleus Smart (ニュークレアス スマート) アプリ*を使用してサウンドプロセッサの操作やモニタリングを行うこともできます。




サウンドプロセッサとのペア設定



アドバイス

- 以下は iOS13 用の説明です。それ以外のバージョンの iOS では、画面が若干異なる場合があります。
- すでに他のサウンドプロセッサまたは補聴器をペア設定している場合は、まずそのペア設定を解除する必要があります。ペア設定を解除する手順については、2 ページを参照してください。

- 1 ご使用の機器で、「設定」をタップします。
- 2 「アクセシビリティ」をタップします。
- 3 「ヒアリングデバイス」をタップします。

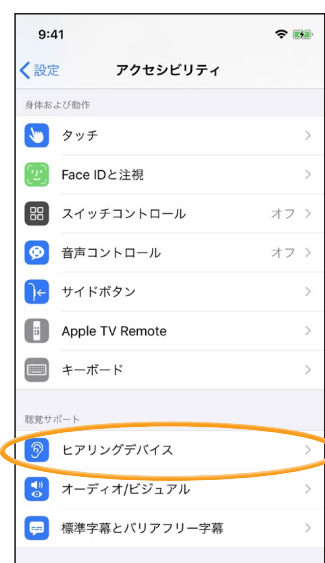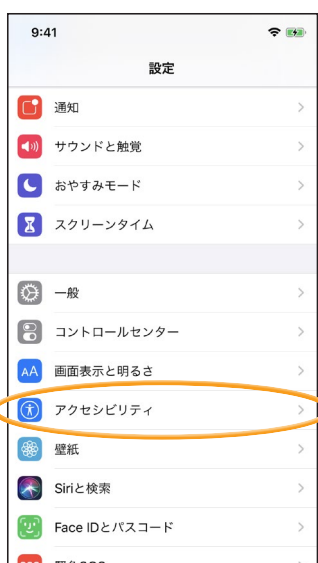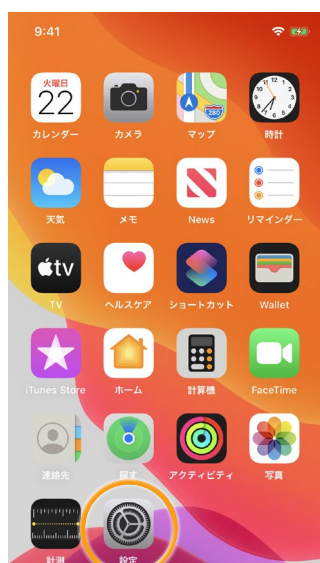

アドバイス

この時点で「ヒアリングデバイス」画面が開いた場合は、手順 4 に進みます。



アドバイス

これは iOS13 用の説明です。それより前のバージョンでは、「一般」、「アクセシビリティ」の順にタップする必要があるかもしれません。

- 4 「Bluetooth」がオンになっていない場合は、オンに設定します。
- 5 サウンドプロセッサの電源をいったん切ってから、再度入れます。
- 6 自分の名前が画面に表示されたら、それをタップします。



両側装着で 2 台のサウンドプロセッサがある場合は、まず一方のサウンドプロセッサの電源をオフ/オンしてから、もう一方のサウンドプロセッサの電源をオフ/オンします。



ご使用の機器がサウンドプロセッサを検索します。



アドバイス

片側にサウンドプロセッサ、反対側に iPhone、iPod touch または iPad に対応した補聴器を装着している場合も、この方法で両方をペア設定できます。



* コクレア Nucleus Smart アプリは、App Store および Google Play から入手できます。互換性情報については、www.cochlear.com/compatibility をご覧ください。

...次のページに続く...

- 7 「ペアリング」をタップして、ペア設定を了承します。両側装用でサウンドプロセッサが2台ある場合は、このメッセージが2回表示されます。



ペア設定が開始されると、



- LED が 4 秒間、青色に点滅します。
- アラーム音が 6 回鳴ります。

ペア設定には 120 秒ほどかかる場合があります。

ペア設定が完了すると、

- LED が 4 秒間、青色に点滅します。
- メロディーが鳴ります。



アドバイス

ペア設定が完了するまで、音声のストリーミングは開始しないでください。

- 8 ペア設定が完了しました。



この後、**Nucleus Smart アプリ**を設定して使用できます。詳しくは、『**Nucleus Smart アプリ取扱説明書**』を参照してください。



アドバイス

- **無線干渉:** サウンドプロセッサを iPhone、iPod touch、または iPad とペア設定または接続しようとしたときに、電子レンジ、ワイヤレスルーター、テレビストリーマーなどの機器から干渉を受ける場合があります。これが起こった場合は、干渉源の機器から離れた場所でもう一度試してください。
- **複数の Apple 機器とのペア設定:** サウンドプロセッサは最大 5 台の対応する Apple 機器とペア設定できますが、サウンドプロセッサを操作できるのは常にどれか 1 台だけです。

サウンドプロセッサとのペア設定の解除

新しいサウンドプロセッサを受け取った場合など、今までとは異なるサウンドプロセッサを使用する場合は、以下のことを行う必要があります。


- 古いサウンドプロセッサとのペア設定を解除します。
- 新しいサウンドプロセッサとペア設定します。

- 1 「設定」>「アクセシビリティ」>「ヒアリングデバイス」の順に進みます。
- 2 ペア設定されているサウンドプロセッサを選択します。
- 3 「このデバイスのペアリングを解除」をタップして、サウンドプロセッサとのペア設定を解除します。



アドバイス

両側装用で 2 台のサウンドプロセッサを iPhone、iPod touch、または iPad とペア設定している場合は、両側のペア設定が解除されます。

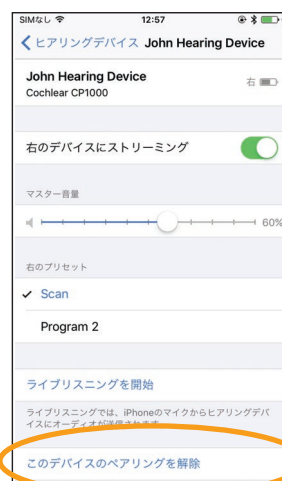

- アプリの詳細については、『**Nucleus Smart アプリ取扱説明書**』を参照してください。
- サウンドプロセッサの詳細については、『**Nucleus 7 サウンドプロセッサ取扱説明書**』を参照してください。
- ヒント、使い方の動画、その他の情報については、コクレア社のウェブサイトをご覧ください。www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

販売名: Nucleus 7 サウンドプロセッサ
承認番号: 23000BZX00310000

Cochlear、「Hear now. And always」、Nucleus、および楕円形のロゴは、Cochlear Limited の商標または登録商標です。Apple、iCloud、iPhone、iPod touch、および iPad は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

© Cochlear Limited 2020

D942820 V3
Japanese translation of D1457498 V2 2020-06